



mylife™ SafetyLancets

Geringeres Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen bei der Entnahme von Kapillarblutproben

Das innovative patentierte Design der mylife™ SafetyLancets macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe bieten Sicherheit und schützen Patienten wie auch medizinisches Fachpersonal vor Kreuzkontamination und Verletzungen. mylife™ SafetyLancets sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) und mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

Sicherheitsmerkmale beider Produkte

- An der Sicherheitsversiegelung lässt sich erkennen, ob die mylife™ SafetyLancet noch unbenutzt ist
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontamination vor dem Gebrauch
- Dank einmaliger Auslösefunktion nach Gebrauch nicht wiederverwendbar



mylife™ SafetyLancets
(28G/1,5 mm)


Komfortmerkmale beider Produkte

- Hohe Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) unterstützt einen guten Blutfluss bei hohem Komfort
- Kein Laden oder Zusammensetzen vor dem Gebrauch erforderlich



mylife™ SafetyLancets Comfort
(30G/1,2 mm)


So verwenden Sie die mylife™ SafetyLancet

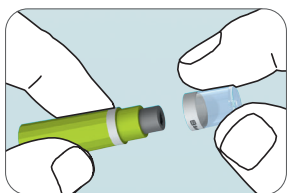


1 Einfach die Schutzkappe drehen und von der mylife™ SafetyLancet abziehen.



2 Die mylife™ SafetyLancet auf die Fingerkuppe aufsetzen.

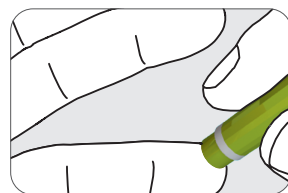

3 Die erhöhte Plattform fest gegen die gewählte Stelle drücken, um den Lanzettenmechanismus zu aktivieren.

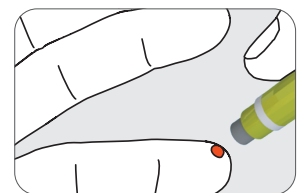

4 Die Nadel springt sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der einmaligen Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancet nicht versehentlich wiederverwendet werden.



mylife™ SafetyLancets

Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur sicheren und komfortablen Routineentnahme von medizinischen Blutproben

In Packungen zu je 100 und 200 Stück mit praktischem Schiebedeckel erhältlich



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

Zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und für andere diagnostische Tests in

- Diabetes-Fachzentren
- Krankenhäusern
- der häuslichen Pflege
- Pflegeheimen
- Praxen

Sterilität bleibt 5 Jahre lang erhalten

- Sterilisiert durch Bestrahlung
- Sterilisierungsdosis nach ISO 11137 festgelegt

Gauge	Nadel-durchmesser	Einstichtiefe	Beschreibung	Menge	Best.-Nr.	PZN DE
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	100 St.	700009359	12900424
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 St.	7100031	9123827
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	100 St.	700009361	12900430
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 St.	700001495	11286117