



# Logiciel Pic Diabetes Management

*Pic Solution.*  
C'est facile avec Pic!

Veillez lire attentivement les instructions et vous assurer de les avoir bien comprises avant d'utiliser le logiciel. Conservez ce guide pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service commercial au 01.55.93.26.48.

## SOMMAIRE

<b>CHAPITRE 1 : INFORMATIONS SUR LE LOGICIEL</b>	<b>3</b>
1 – Aperçu du logiciel Pic Diabetes Management	3
2 – Configuration matérielle et logicielle requise	3
3 – Sécurité	3
<b>CHAPITRE 2 : AVANT UTILISATION DU LOGICIEL PIC DIABETES MANAGEMENT</b>	<b>4</b>
1 – Avant l'installation	4
2 – Installation	4
3 – Connexion du glucomètre au PC	9
4 – Désinstallation	9
<b>CHAPITRE 3 : DÉMARRER LE LOGICIEL PIC DIABETES MANAGEMENT</b>	<b>10</b>
1 – Importation des données depuis le glucomètre	10
2 – Présentation du menu	12
3 – Informations et préférences	13
<b>CHAPITRE 4 : CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>16</b>
1 – Gestion des profils	16
2 – Enregistrement	20
3 – Graphique	23
4 – Analyses	27
5 – Rapport	29
6 – Exportation	35
<b>CHAPITRE 5 : PROBLÈMES ET SOLUTIONS</b>	<b>36</b>
1 – Problèmes et solutions	36
2 – Message d'erreur sur le glucomètre	36

## CHAPITRE 1 : INFORMATIONS SUR LE LOGICIEL

### 1 – Aperçu du logiciel Pic Diabetes Management

Pic Diabetes Management est un logiciel pour PC. Il offre les fonctions suivantes :

- chargement des données des glucomètres
- mémorisation et affichage des données
- conversion graphique des données

Les fonctions offertes par ce logiciel permettent aux personnes atteintes de diabète et aux professionnels de santé qui les suivent de contrôler et à de gérer plus efficacement la maladie.

### 2 – Configuration matérielle et logicielle requise

#### 2,1 – Systèmes d'exploitation compatibles avec le logiciel

- Microsoft® Windows Vista
- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows 8
- Microsoft® Windows 10

#### 2.2 – Configuration matérielle

- Configuration matérielle minimale

CPU	RAM	Disque dur	Écran	Autre
800 MHz	512 MB	50 MB	1024 × 768	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port USB</li> <li>• Câble de raccordement Pic</li> </ul>

- Interface
  - imprimantes
  - moniteur
  - clavier
  - souris

#### 2.3 – Appareil compatible

- Glucomètre Pic GlucoTest
- Glucomètre Pic GlucoTest Diary

### 3 – Sécurité

#### 3.1 Usage

Pic Diabetes Management est un logiciel pour PC à usage domestique et professionnel conçu pour aider les personnes atteintes de diabète et les professionnels de santé qui les entourent. Il leur permet de regrouper, d'analyser et d'évaluer les résultats des tests glycémiques, afin de suivre efficacement l'évolution du diabète.

#### 3.2 – Avertissements

- Ce logiciel ne fournit pas d'indications thérapeutiques.
- Ne modifiez jamais votre traitement de manière significative et n'ignorez aucun symptôme physique sans consulter votre médecin. Consultez systématiquement votre médecin traitant ou le professionnel de santé qui vous suit avant de modifier votre comportement sur la base des valeurs glycémiques obtenues.
- Nous vous recommandons d'éviter d'utiliser le glucomètre lorsqu'il est relié à l'ordinateur. La sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique de l'appareil ne sont en effet garanties que lorsque l'appareil est alimenté en mode batterie et en dehors de toute connexion.

## CHAPITRE 2 : AVANT UTILISATION DU LOGICIEL PIC DIABETES MANAGEMENT

### 1 – Avant l'installation

Avant d'installer le logiciel, suivez les consignes de sécurité ci-dessous. Elles contribuent à vous protéger contre les menaces informatiques.

- Avant d'installer et d'utiliser le logiciel, lancez l'analyse de votre ordinateur à l'aide d'un programme antivirus et anti-logiciel espion de source fiable.
- Installez, configurez et activez un logiciel antivirus adapté.
- Veillez à disposer d'un logiciel antivirus à jour.
- Assurez-vous que les fonctions de sécurité de votre système d'exploitation sont toutes à jour.
- Assurez-vous que le pare-feu de votre PC est activé.

### 2 – Installation


Pour installer votre logiciel, veuillez suivre les instructions suivantes.

2.1 – Rendez vous sur le site web (<http://web.picsolution.com/picglucotest.html>).

– Téléchargez le fichier de configuration du logiciel.


2.2 – Double-cliquez sur le fichier « PicDMS Setup.exe ».

2.3 – Vous verrez apparaître la fenêtre « Sélectionner la langue d'installation ». Cliquez pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez la langue de votre choix. Cliquez sur « OK » pour lancer l'installation.

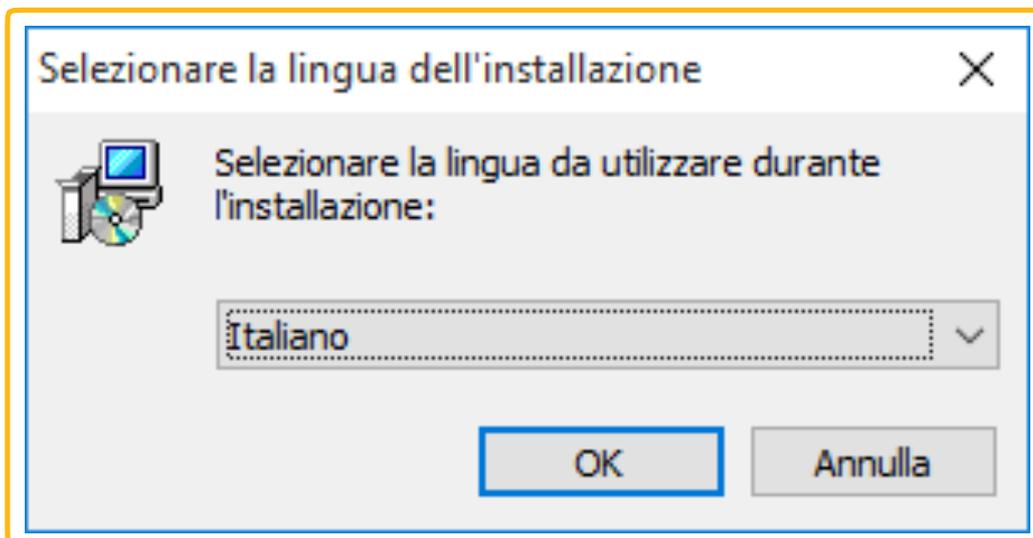


<Figure 1> Configuration - Choix de la langue

## 2.4 – L'assistant d'installation s'ouvre. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

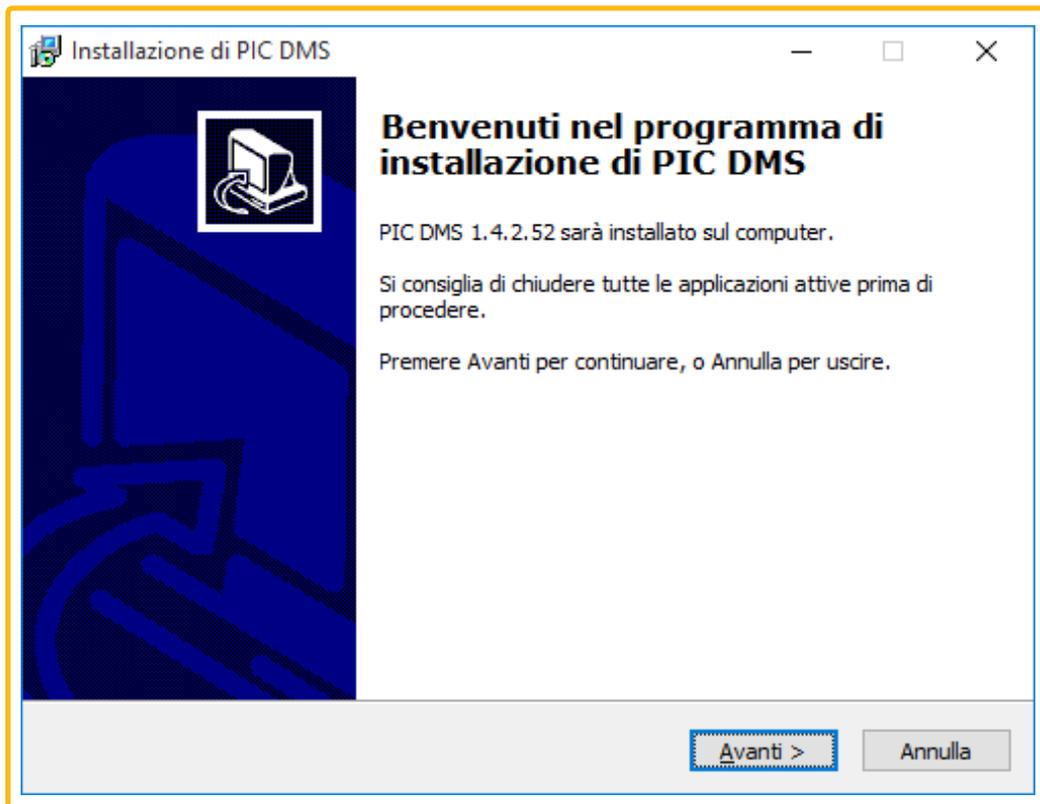


<Figure 2> Configuration – Assistant d'installation

## 2.5 La fenêtre « Contrat de licence » s'affiche. Sélectionnez « J'accepte les termes du contrat de licence » puis cliquez sur « Suivant ».

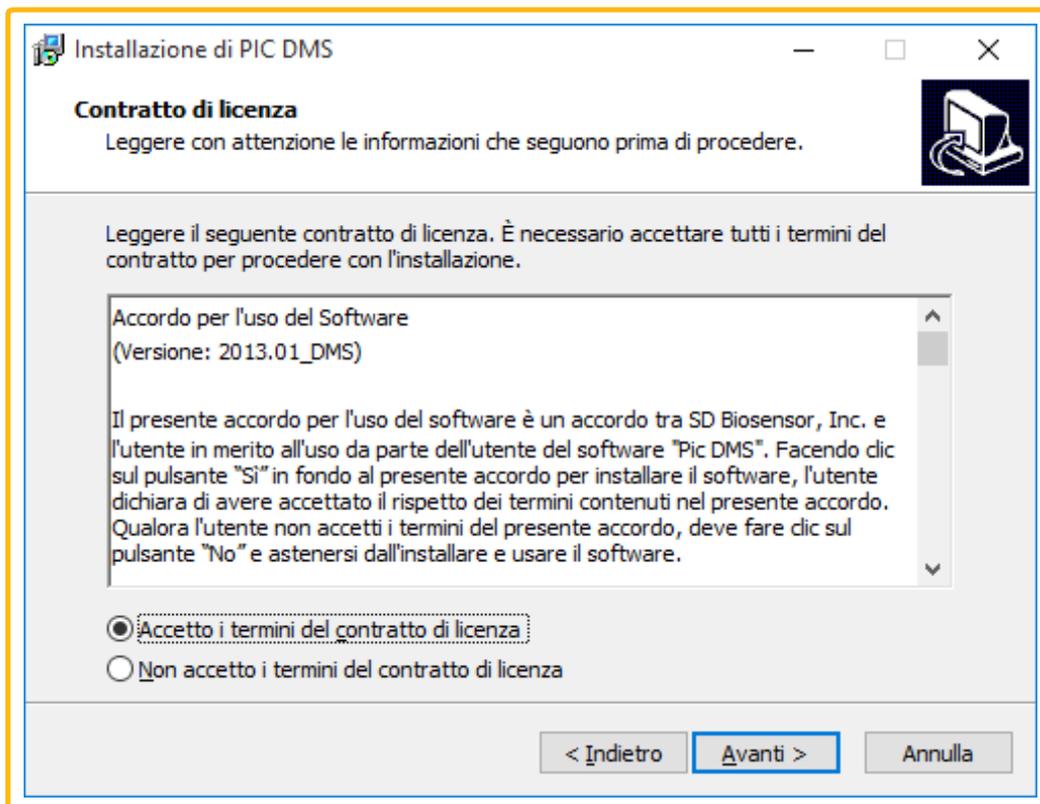


<Figure 3> Configuration - Boîte de dialogue licence

**2.6 – La fenêtre « Sélection des composants » s’affiche. Cliquez sur l’icône du menu déroulant. Sélectionnez l’installation complète ou l’installation personnalisée puis cliquez sur « Suivant ».**

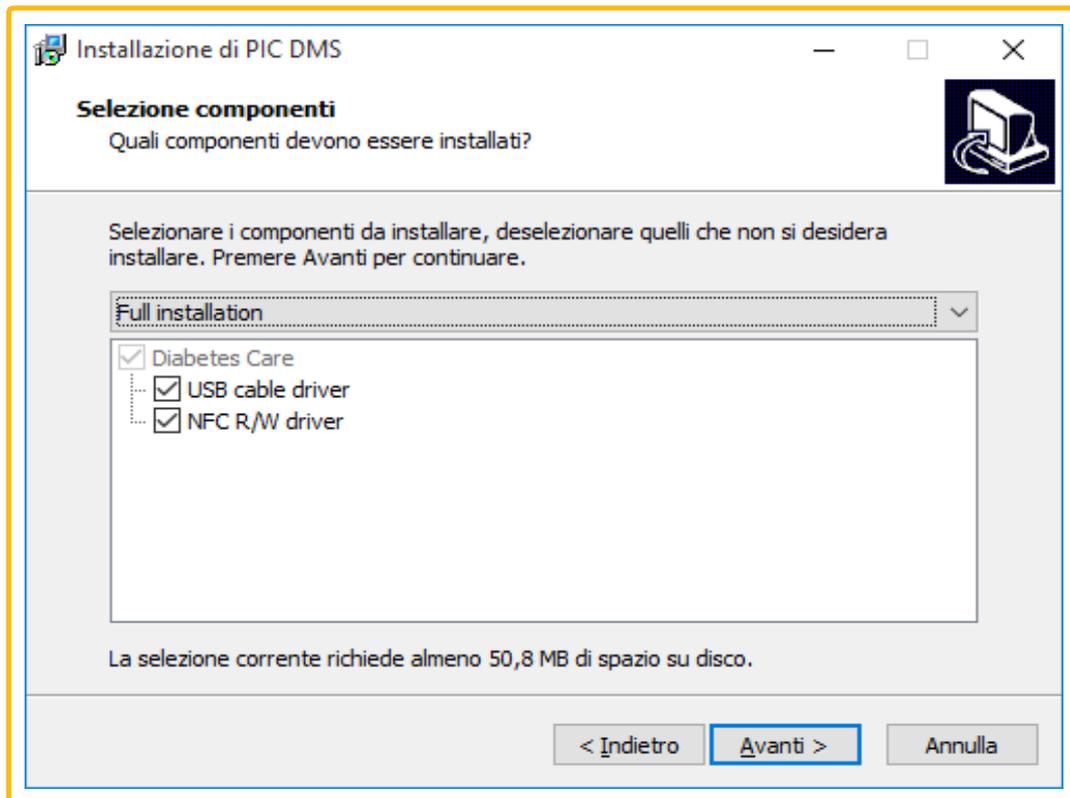


<Figure 4> Configuration – Sélection des composants

**2.7 – La fenêtre « Sélection du dossier du menu Démarrer » s’affiche. Choisissez le dossier où vous souhaitez placer le raccourci du programme. Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer de dossier dans le menu Démarrer.**

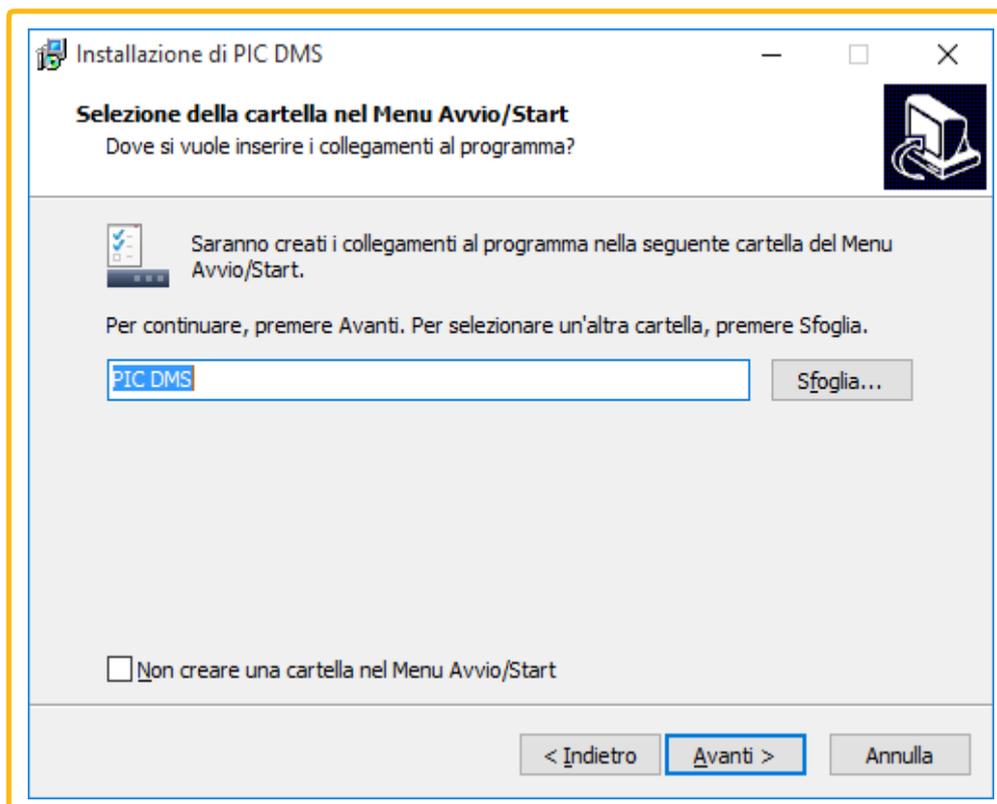


<Figure 5> Configuration – Sélection du dossier du menu Démarrer

Sélectionner « Créer une icône sur le bureau » si vous désirez créer une icône sur le bureau. Cliquez sur « Suivant ».

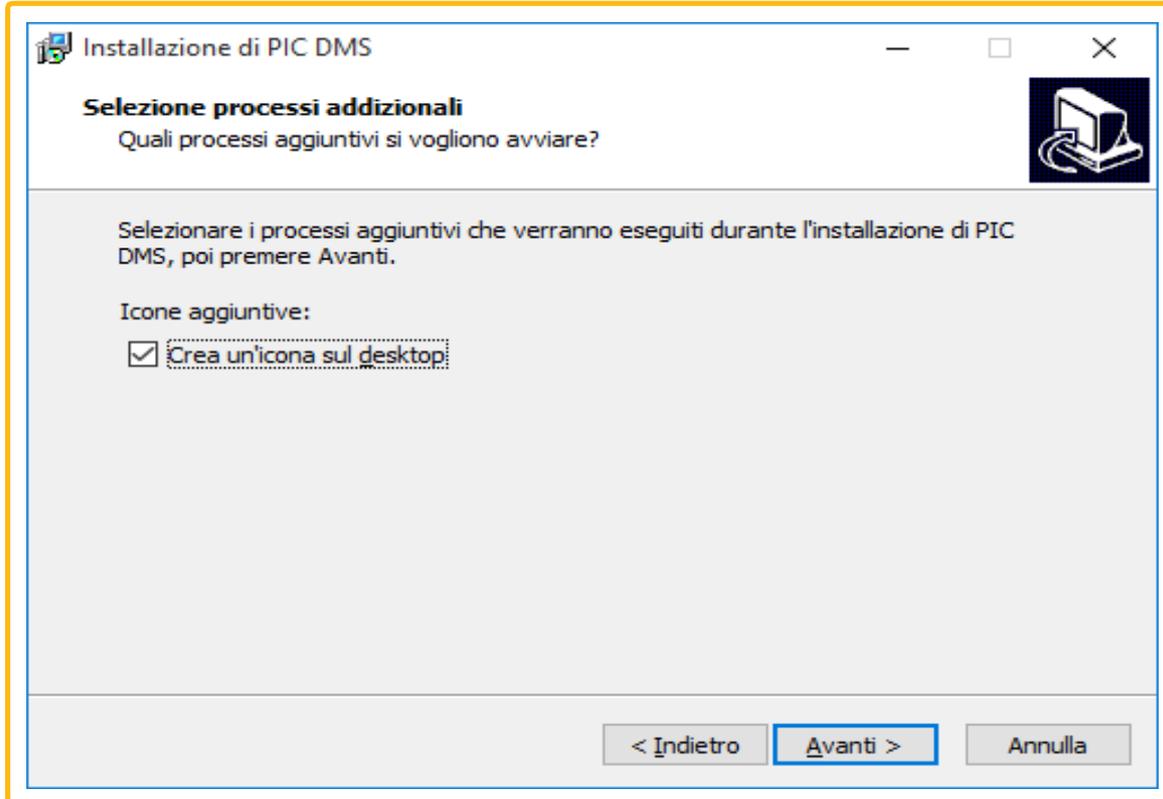


<Figure 6> Configuration — Créer une icône sur le bureau.

## 2.8 – Cliquez sur « Installer » pour poursuivre l'installation.

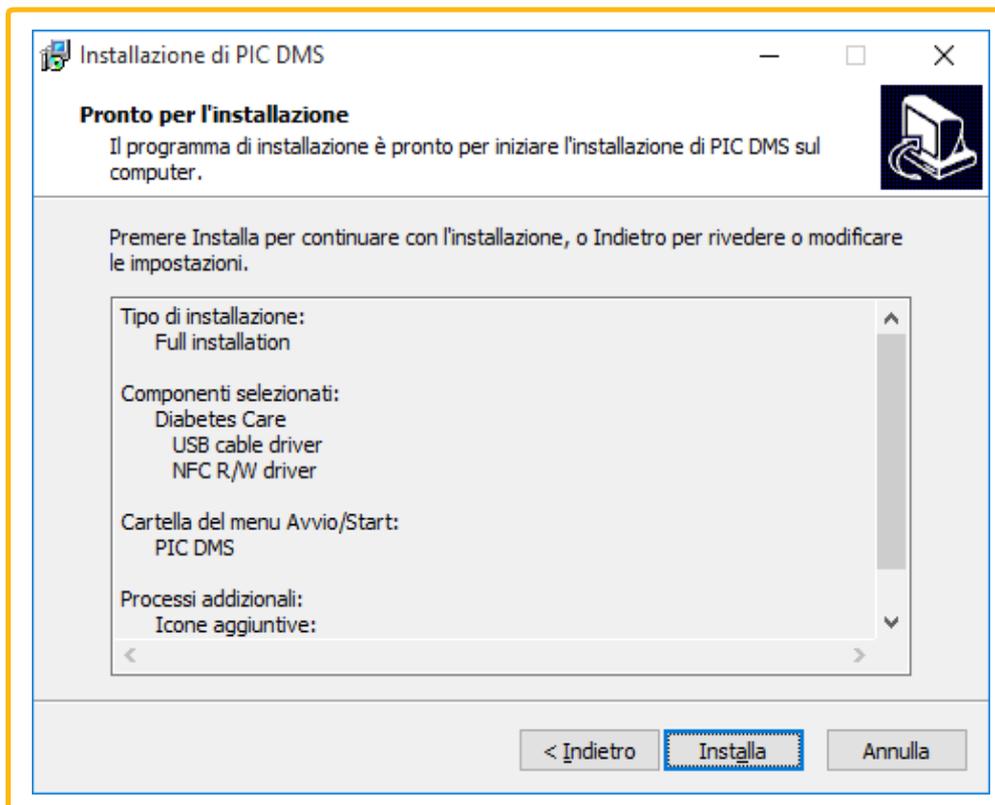


<Figure 7> Configuration – Prêt à installer

**2.9 La fenêtre de l'assistant d'installation du pilote du programme s'affiche automatiquement. Cliquez sur « Suivant » pour installer le pilote.**

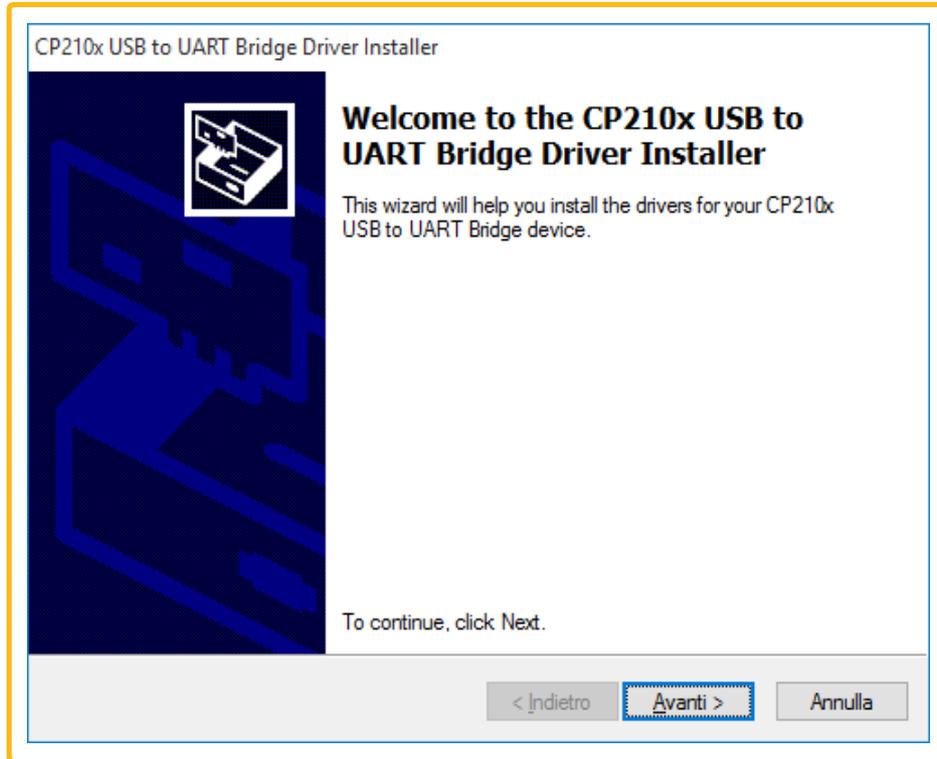


<Figure 8> Installation du pilote

**2.10 – Cliquez sur « Fin » pour terminer l'installation guidée du pilote.**

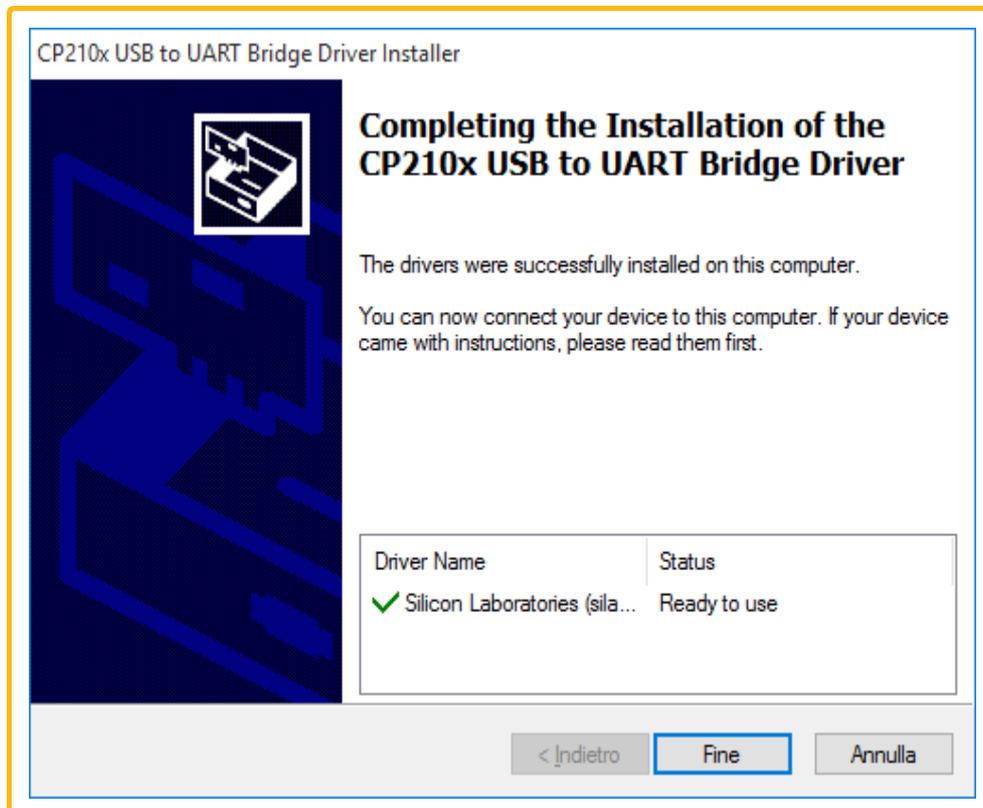

<Figure 9> Installation du pilote -Fin

**2.11 – Terminer l'installation. Sélectionnez « Ouvrir Pic DMS » pour lancer le logiciel puis cliquez sur « Fin »**

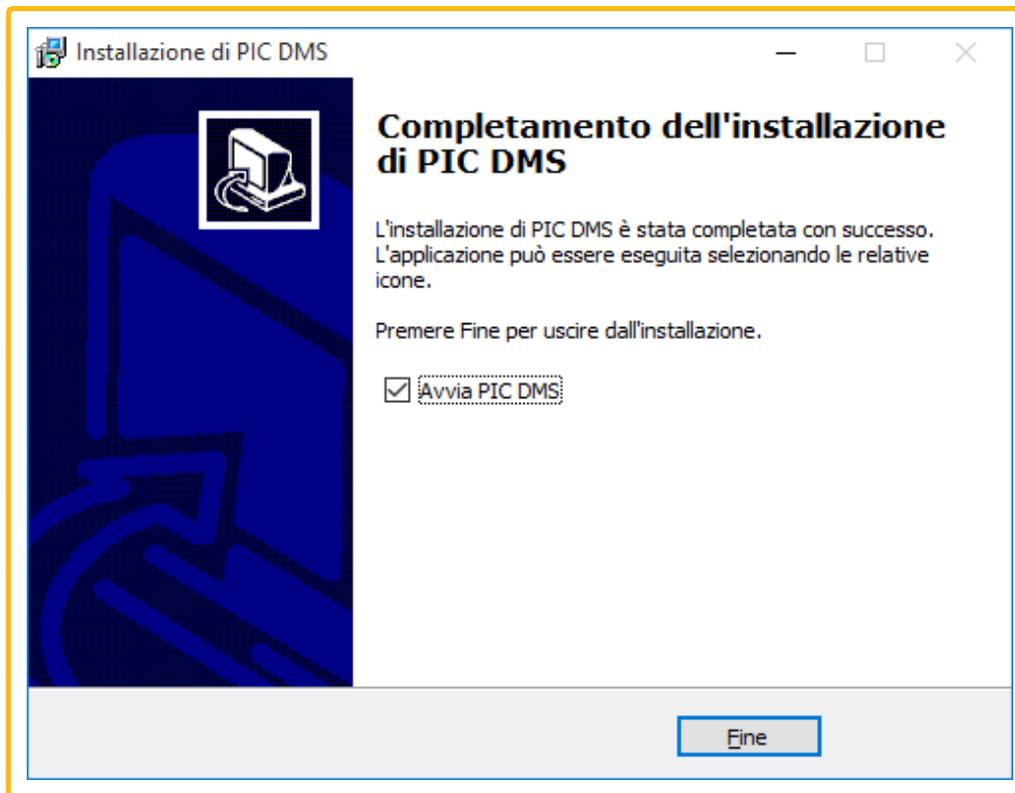

<Figure 10> Configuration – Fin

### 3 – Connexion d'un glucomètre au PC

Connectez le glucomètre au PC à l'aide du câble de raccordement Pic en suivant la procédure décrite ci-dessous.

**3.1 – Assurez-vous que le glucomètre est éteint**

**3.2 – Connectez le câble de raccordement Pic au port USB de votre PC.**

Pour garantir la compatibilité du glucomètre et du système de transmission USB, utilisez le câble de raccordement Pic.

#### NOTE

Le câble de raccordement Pic est un accessoire optionnel. Pour l'obtenir, appelez votre service commercial au 01.55.93.26.48.

### 4 – Désinstallation

**4.1 – Cliquez sur le menu Démarrer/Start/ Panneau de configuration/ Programmes/ Programmes et fonctionnalités.**

**4.2 – Sélectionnez Pic Diabetes Management et cliquez sur « Désinstaller » pour le désinstaller.**


## CHAPITRE 3 : DÉMARRER LE LOGICIEL PIC DIABETES MANAGEMENT

### 1 – Importation des données depuis le glucomètre

1.1 – Double-cliquez sur l'icône située sur le bureau. Le logiciel s'ouvre.




<Figure 11> Icône sur le bureau

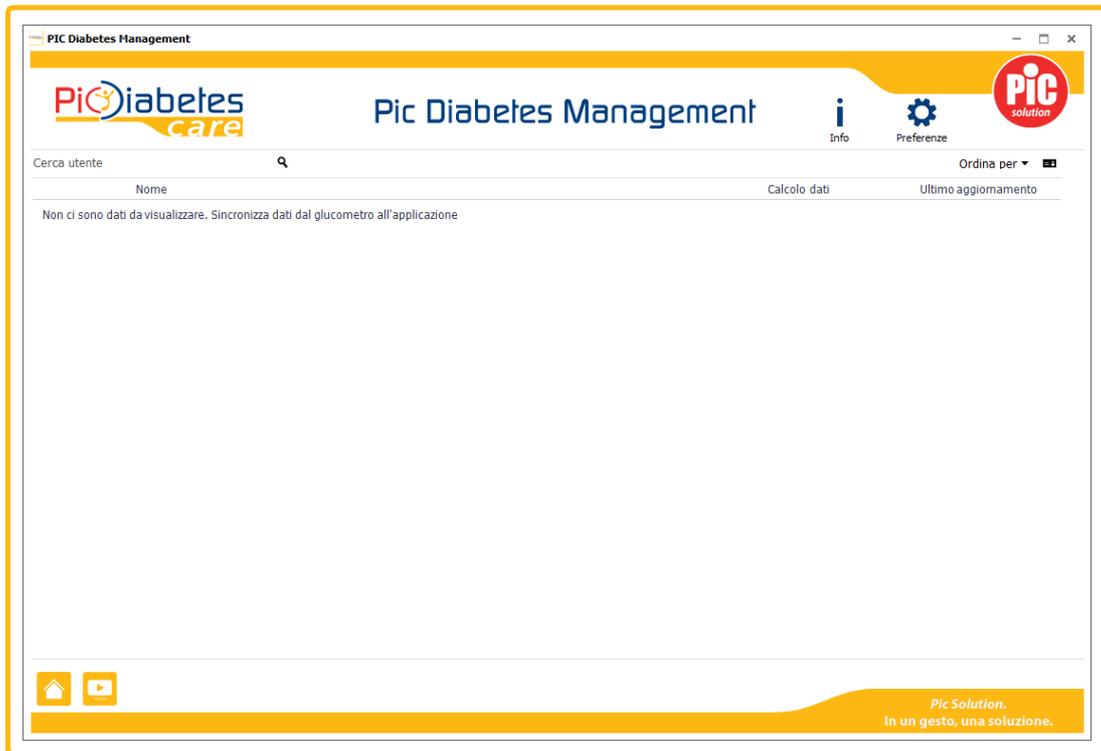

<Figure 12> Interface utilisateur avant le transfert des données

1.2 – Allumez le glucomètre.

## 1.3 – Les données sont transférées automatiquement depuis le glucomètre.

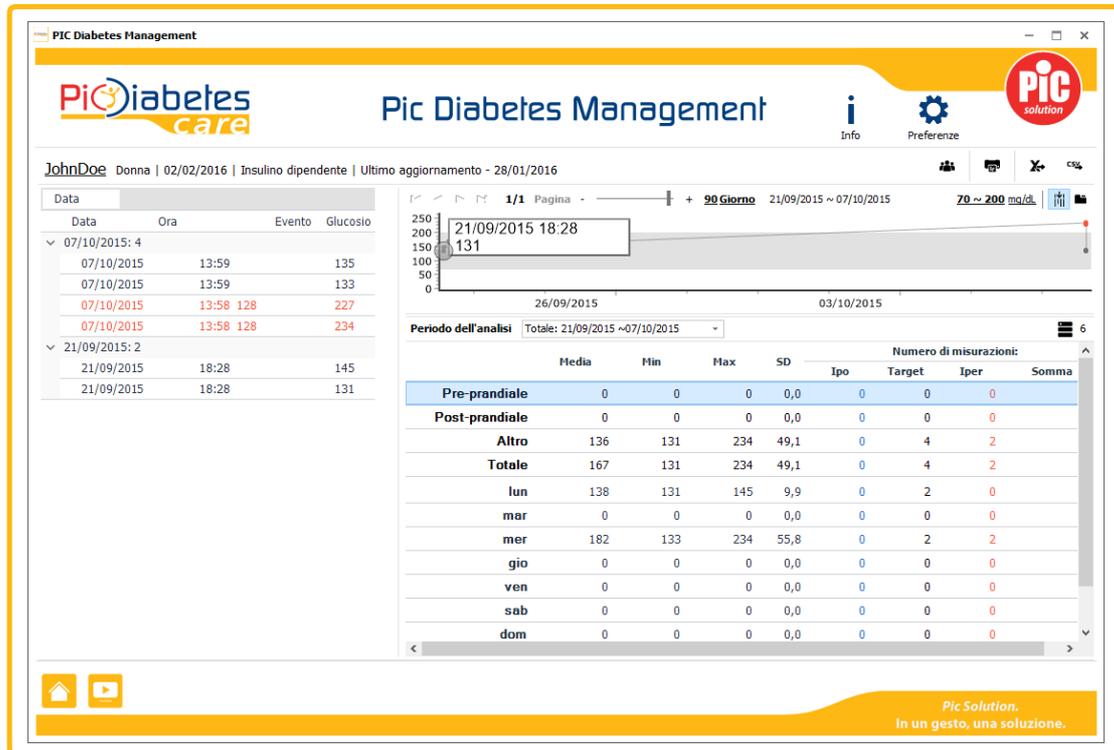

<Figure 13>Interface utilisateur avant le transfert des données

### NOTE


- Lorsqu'il est connecté au PC, le glucomètre n'est pas en mesure d'effectuer de test glycémique.
- Une décharge électrostatique (DES) 1 au niveau du port du câble peut entraîner un ralentissement du transfert de données. Le glucomètre transmettra alors à nouveau les données automatiquement.

1 Décharge électrostatique : passage de courant électrique soudain entre deux objets chargés d'électricité à la suite d'un contact, d'un court-circuit ou d'une panne électrique

## 2 – Présentation du menu


Le logiciel propose deux modes de présentation.

### 2.1 – Vue gestion profils

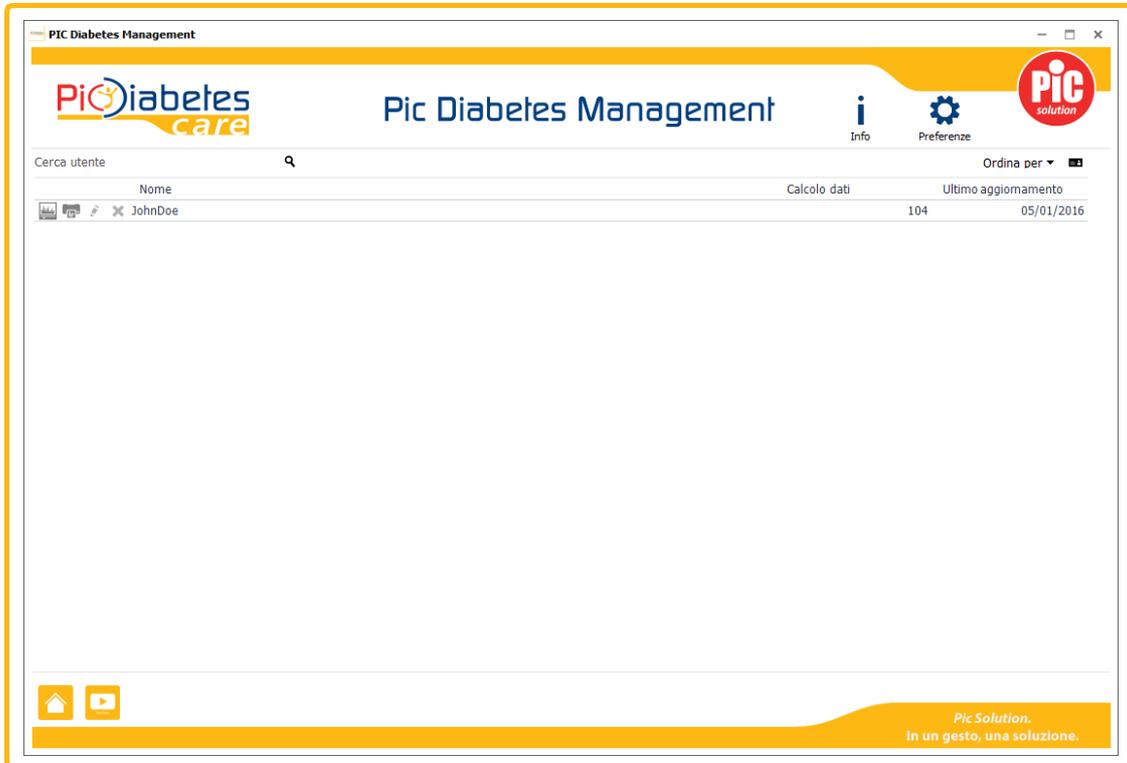

<Figure 14> Vue gestion patient

### 2.2 – Vue données profils

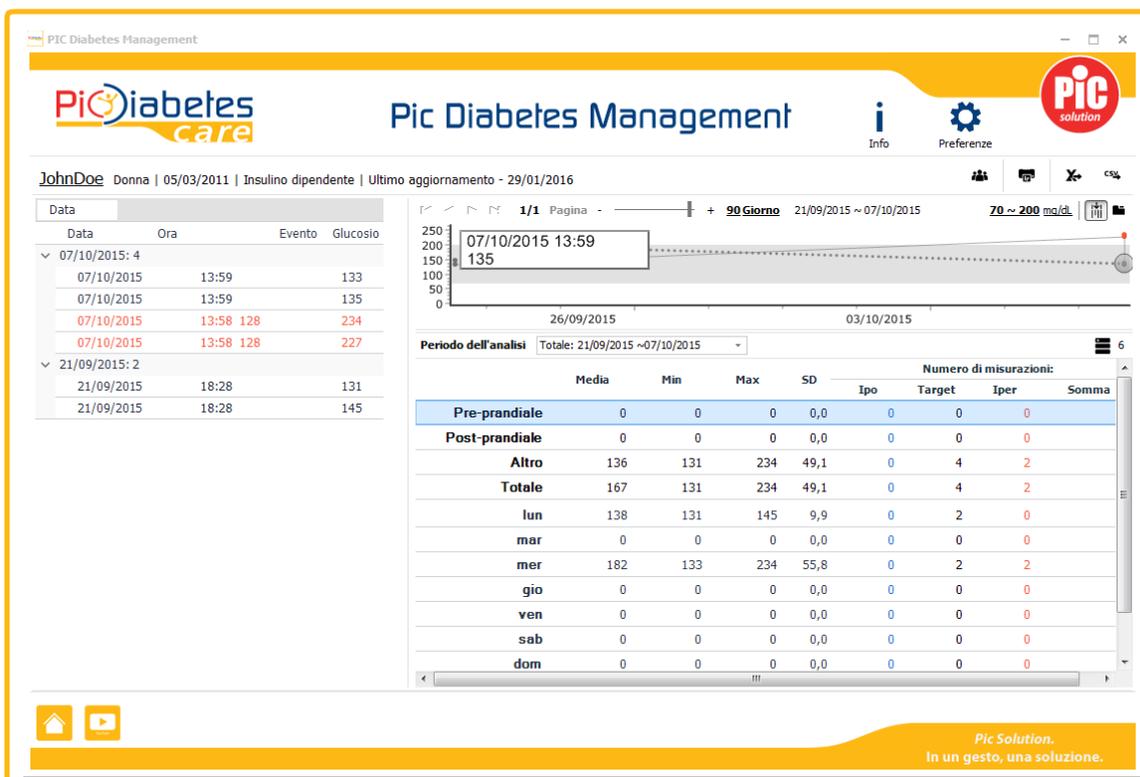


<Figure 15> Vue données patient

## 3 – Informations et préférences

### 3.1 – Informations

La fonction Info contient les informations relatives à la version du logiciel utilisé et aux droits de propriété intellectuelle.

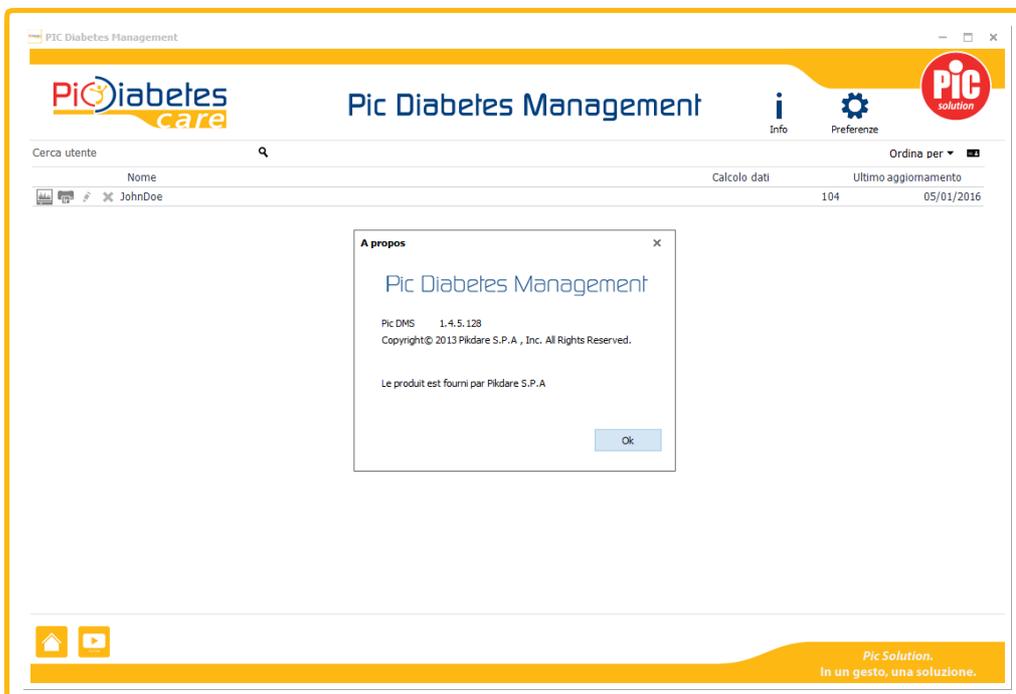

<Figure 16> Boîte de dialogue Info

### 3.2 – Préférences


La fonction Préférences vous permet de configurer les paramètres suivants : glycémie, localisation, compte, format date/heure, graphique



<Figure 17> Préférences

#### 3.2.1 – Glycémie

Vous pouvez paramétrer l'unité de mesure de la glycémie (mg/dL ou mmol/L) ainsi que l'intervalle de l'objectif glycémique.

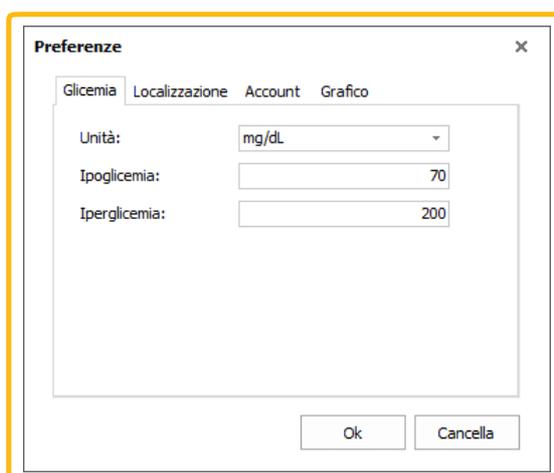


<Figure 18> Préférences - Glycémie

## NOTE

- L'unité de mesure de la glycémie (mg/dL) et l'intervalle de l'objectif glycémique (lpo/lper : 70/200) sont prédéfinis.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier l'unité de mesure en mmol/L.

### 3.2.2 – Localisation

Vous pouvez modifier la langue et le format de la date.

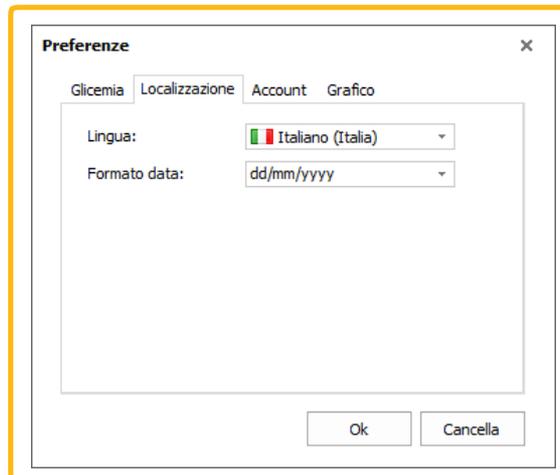


<Figure 19> Préférences - Localisation

### 3.2.3 – Compte. Protégez vos données en sélectionnant l'option « Application bloquée »

Après avoir sélectionné l'option de protection (bloquée), il vous est demandé de saisir un mot de passe.

Vous pouvez gérer plusieurs glucomètres à la fois, même lorsque l'accès avec mot de passe est configuré. Il sera toutefois nécessaire d'utiliser le même mot de passe.


Si l'accès avec mot de passe est activé, il sera impossible d'exécuter le programme sans saisir le mot de passe.

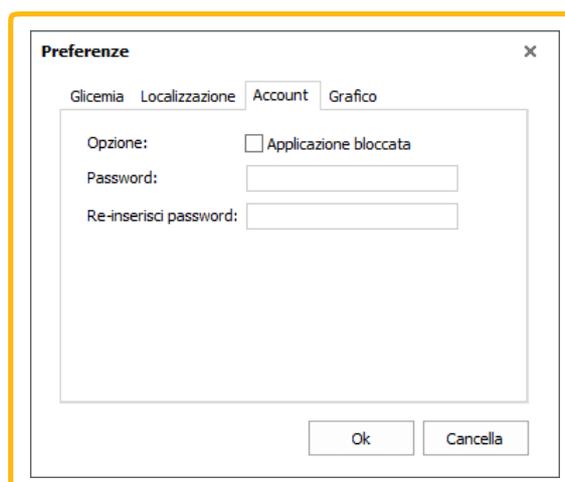

<Figure 20> Préférences - Compte

## 3.2.4 – Graphique

Vous pouvez choisir entre différentes options prédéfinies de présentation et de classement.

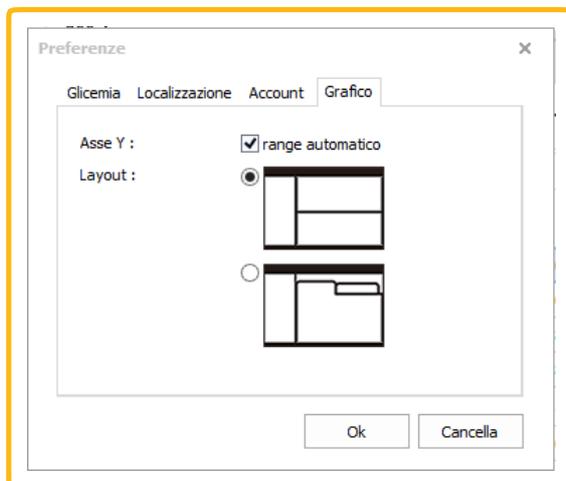

<Figure 21> Preferenze - Grafique

## CHAPITRE 4 : CARACTÉRISTIQUES

### 1 – Gestion des profils

Le logiciel possède une fonction Gestion de profils

#### 1.1 – Créer un nouveau profil

Le logiciel possède une fonction Gestion de profils



<Figure 22> Créer un nouveau patient

#### 1.1.1 – La boîte de dialogue Informations patient s'ouvre. Saisir les informations du patient puis cliquer sur « OK ».

**Informazioni utente** ×

**Nome**

**Cognome**

**e-mail**

**telefono**

**Genere**

**Data di nascita**  
 mese

**Altezza**  cm **Peso**  kg

**Tipo diabete**

**Diabetico dal**  
 mese

**Target glicemia**  
 -  mg/dL

**Lista dispositivo**


Prodotto	Numero di serie
NewSD GlucoNavii NFC	M07C01AA0017

<Figure 23> Informations patient

## NOTE

- Les points d'exclamation signalent les informations obligatoires. Le patient ne peut pas être enregistré tant que toutes les informations obligatoires n'ont pas été saisies.


Après l'enregistrement, les données transférées depuis le glucomètre s'affichent.

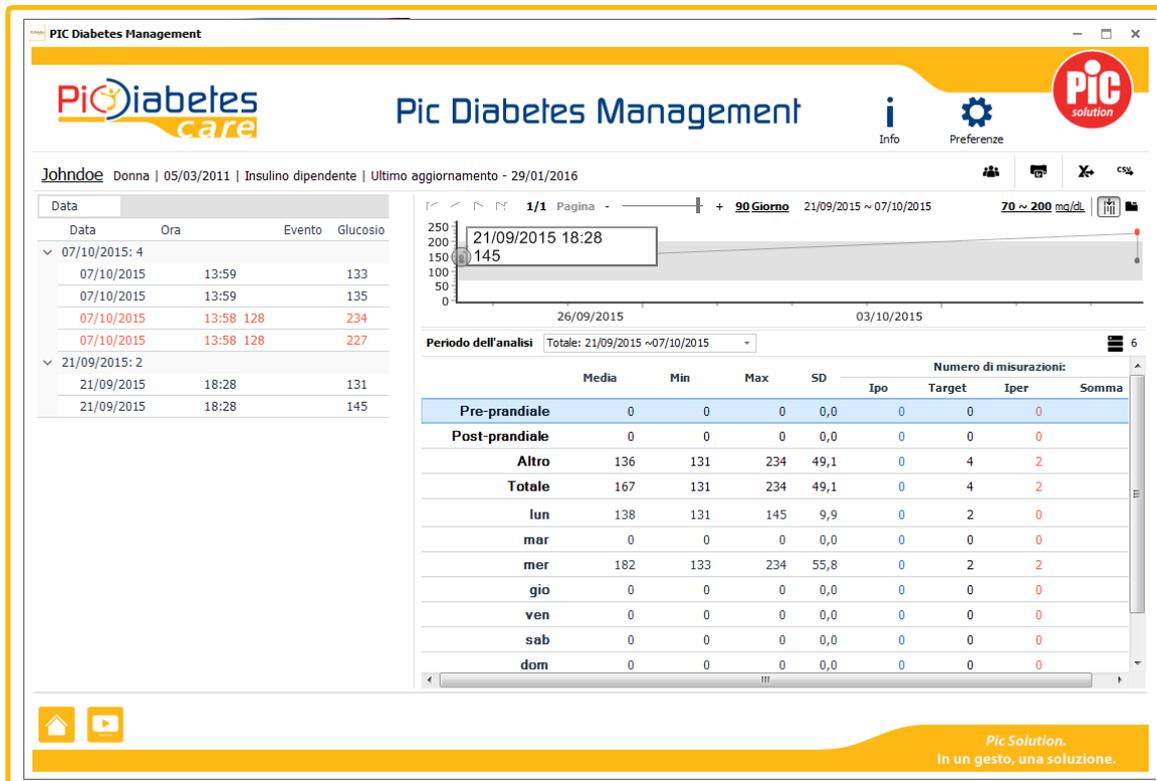

<Figure 24> Mode Vue données


## 1.2 – Ajouter des données à un profil existant

Utiliser le profil d'un patient existant après le transfert des données.

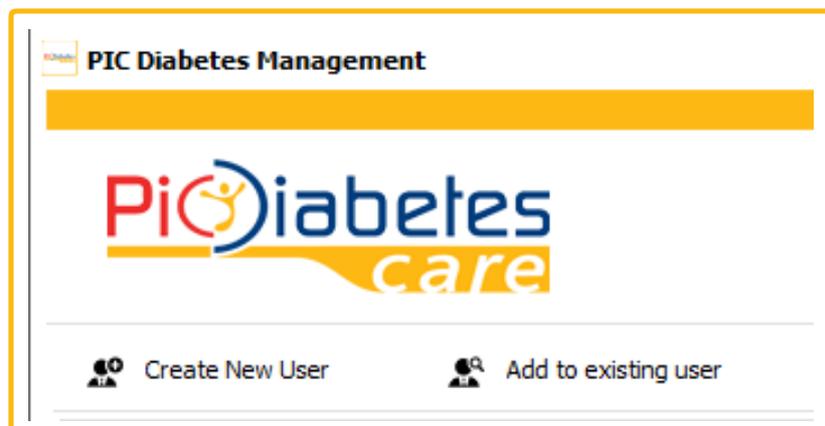

<Figure 25> Ajouter à un profil existant

## 1.2.1 – Cherchez le nom du patient existant. Sélectionnez le profil et cliquez sur « OK ».

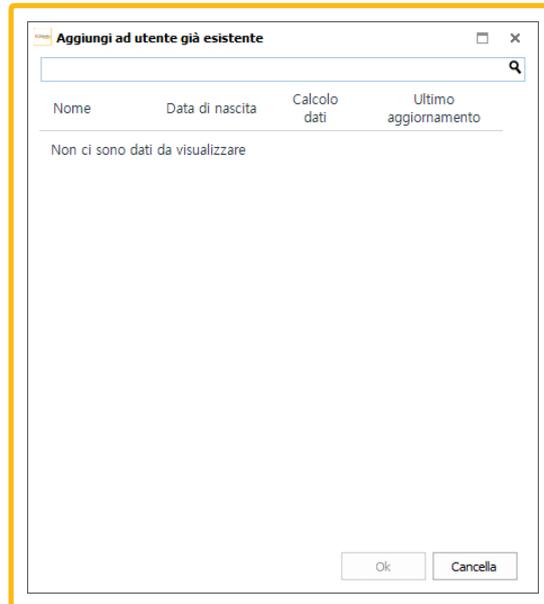


<Figure 26> Boîte de dialogue Ajouter au profil existant

Les données qui seront transférées par la suite seront ajoutées au profil du patient existant.

## 1.3 Gestion des profils

À côté de chaque nom de patient apparaissent différentes icônes correspondant à différentes fonctions.

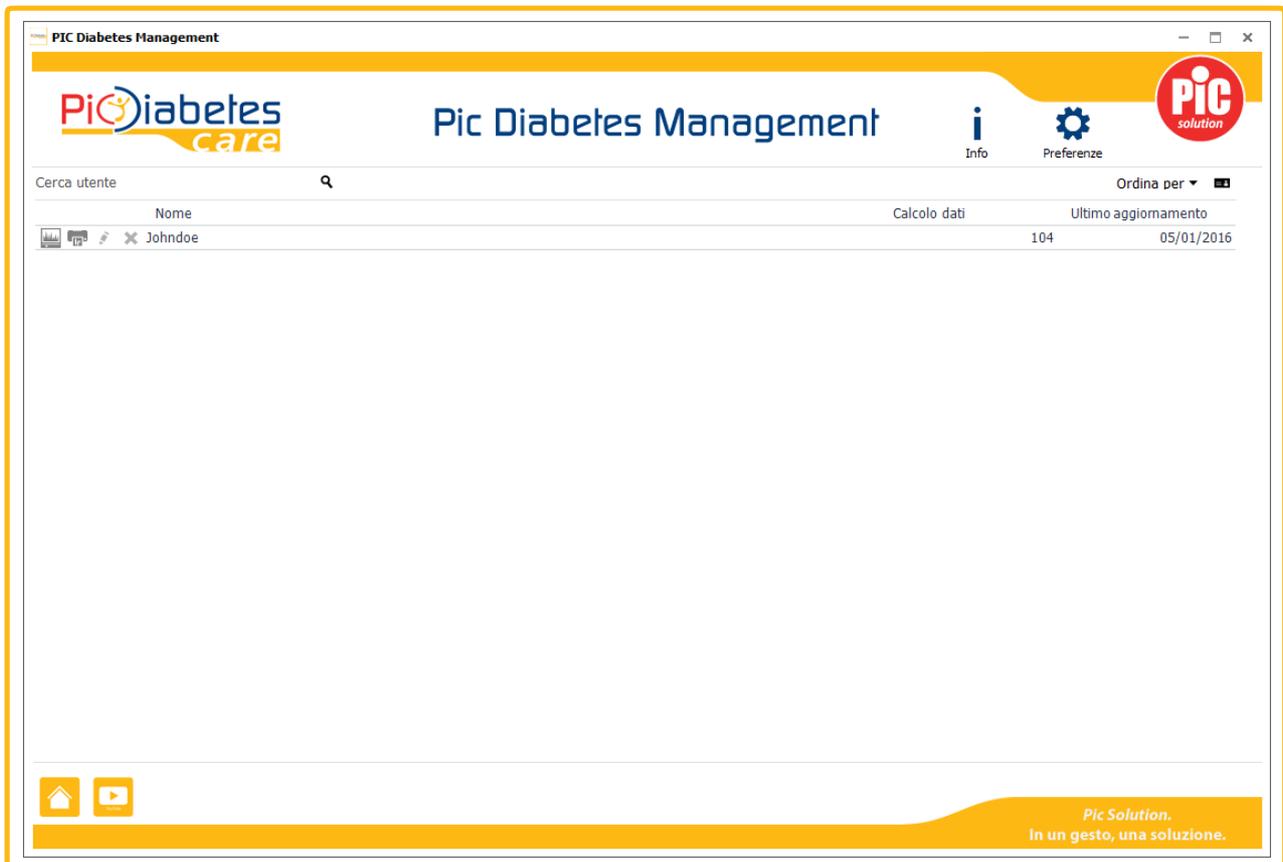

<Figure 27> Écran Gestion des profils

Elles vous permettront de visualiser les données du patient sélectionné, de les exporter, de modifier les informations du patient ou d'éliminer le profil.


<Tableau 1> Icônes Gestion des profils

ICÔNE	NOM	DESCRIPTION
	Données	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualiser les données du patient sélectionné</li> <li>Les données s'afficheront en mode Vue données patient</li> </ul>
	Exporter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exporter les données du patient sélectionné.</li> </ul>
	Modifier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier les informations du patient sélectionné.</li> </ul>
	Éliminer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer le profil sélectionné.</li> </ul>


Vous avez également la possibilité de vérifier les informations du patient ou de réorganiser la liste des patients.

### 1.3.1 – Vérifier les informations patient

Cliquez sur l'icône des informations patient. Les informations patient s'affichent sur la droite.

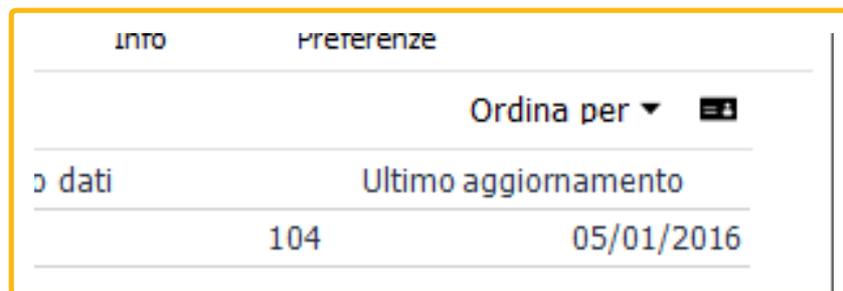


<Figure 28> Icône Informations patient

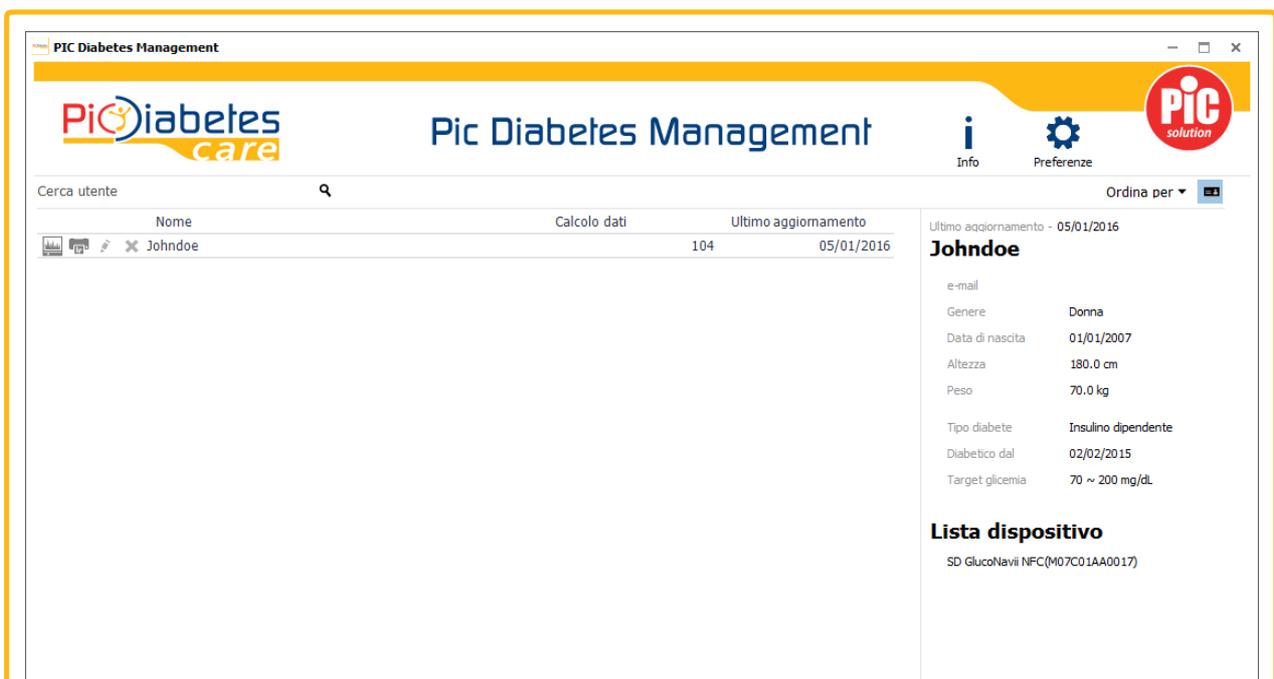

<Figure 29> Informations patient

### 1.3.2 – Tri de la colonne patient

Cliquez sur « Trier par ». La colonne patient peut être triée par date de dernière modification, nom du patient ou nombre de données.

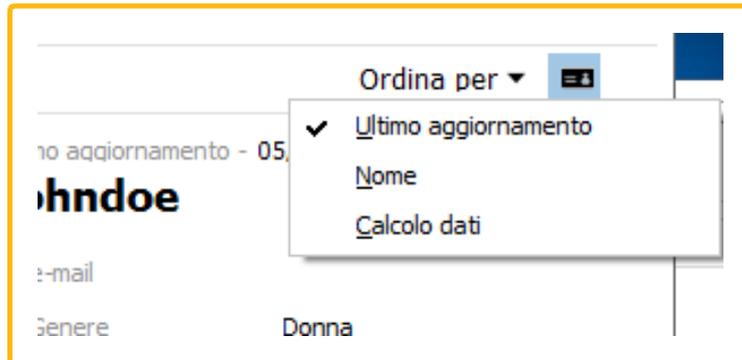

<Figure 30> — Informations patient — Trier par

## 2 Enregistrement

Les données sont affichées, regroupées et organisées à partir de la date la plus récente.

Data		
Data	Ora	
10/14/2013: 1		
10/14/2013	1:20 PM	148
9/25/2013: 3		
9/25/2013	7:15 PM	Lo
9/25/2013	7:14 PM	41
9/25/2013	7:13 PM	55
7/25/2013: 15		
7/25/2013	5:56 PM	108
7/25/2013	5:56 PM	103
7/25/2013	5:53 PM	101
7/25/2013	5:52 PM	99
7/25/2013	5:51 PM	97
7/25/2013	5:49 PM	95
7/25/2013	5:48 PM	100
7/25/2013	5:38 PM	285
7/25/2013	5:37 PM	308
7/25/2013	5:35 PM	293

<Figure 31> Enregistrement

## 2.1 – Critères de regroupement

Les données de mesure peuvent être affichées par groupes.

En mode prédéfini, elles sont regroupées par date. Vous avez toutefois la possibilité de modifier ce critère de regroupement en faisant glisser l'intitulé « événement » ou « glucose » sur la barre grisée.



<Figure 32> Regroupement colonne

Par exemple, si l'option « heure » a été sélectionnée dans le cadre de regroupement de la colonne, les données seront regroupées par heure.



Data	Ora	Evento	Glucosio
7:03 PM: 1			
2011/09/09	7:03 PM		492
7:02 PM: 1			
2011/09/09	7:02 PM		472
7:01 PM: 1			
2011/09/09	7:01 PM		484
7:00 PM: 1			
2011/09/09	7:00 PM		506
6:59 PM: 1			
2011/09/09	6:59 PM		495
6:58 PM: 1			
2011/09/09	6:58 PM		479
6:57 PM: 1			
2011/09/09	6:57 PM		490
6:56 PM: 2			
2011/09/09	6:56 PM		499
2011/09/09	6:56 PM		486
6:55 PM: 1			
2011/09/09	6:55 PM		484
6:54 PM: 3			

<Figure 33> Affichage de l'enregistrement après regroupement de la colonne

## 2.2 – Supprimer le regroupement de la colonne


Faites glissez et relâchez la colonne pour la supprimer du « cadre de regroupement de la colonne » et la déplacer dans la partie « intitulé colonne ».



<Figure 34> Supprimer le regroupement de la colonne

## 2.3 – Tri de la colonne


Placez le curseur de la souris sur l'intitulé de la colonne puis cliquez sur l'icône . Vous pouvez classer les données dans l'ordre croissant ou décroissant. Seules dates et heure sont disponibles.

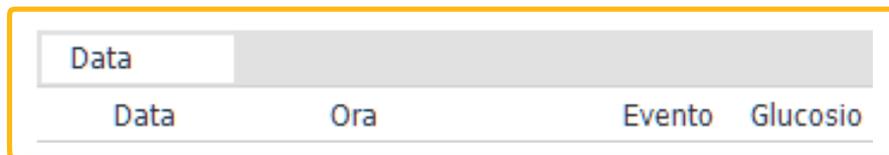


<Figure 35> Trier la colonne

## 2.4 – Filtrer la colonne


Placez le curseur de la souris sur l'intitulé de la colonne puis cliquez sur l'icône . Vous verrez s'afficher les options du filtre : glucose ou «événement».

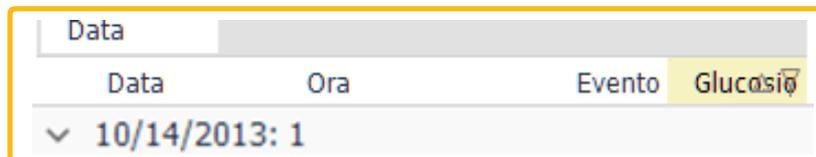

<Figure 36> Appliquer un filtre sur la colonne

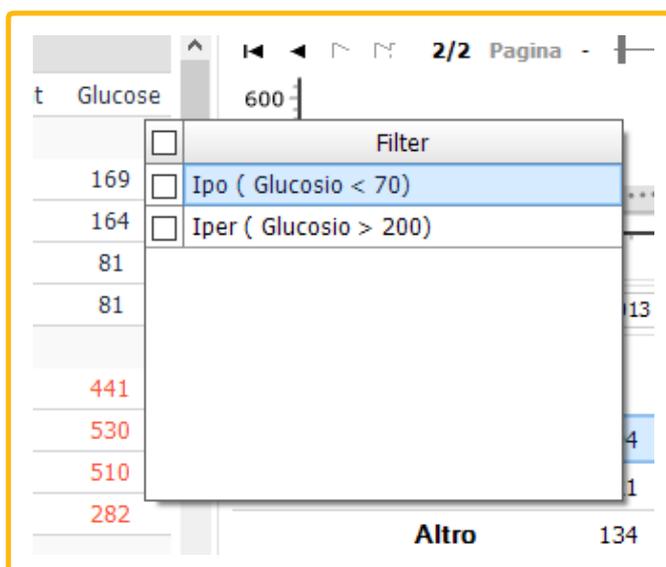

<Figure 37> Options de filtrage glucose

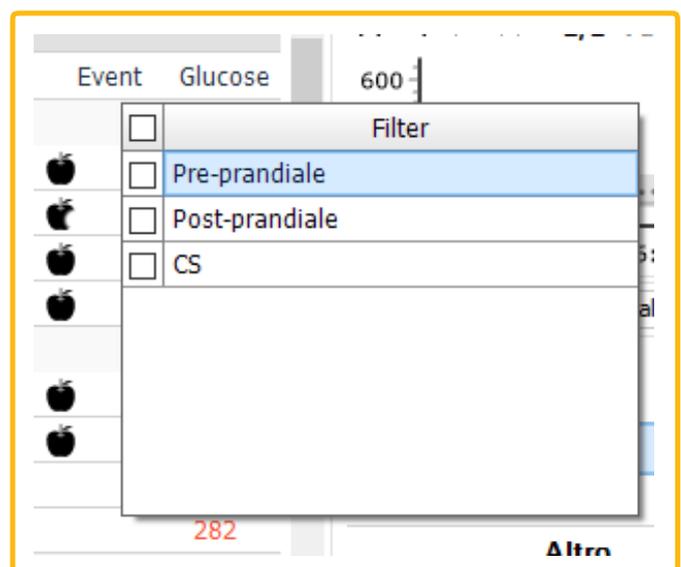


<Figure 38> Options de filtrage événement

### NOTE

- Sélectionnez CS (Control Solution, Solution de contrôle) comme critère de filtrage des événements pour obtenir tous les résultats des tests de la solution de contrôle.

## 3 – Graphique

Les dates de la période sélectionnée sont indiquées sur le graphique. Afin de faciliter l'analyse des données, l'intervalle de l'objectif glycémique est également affiché.

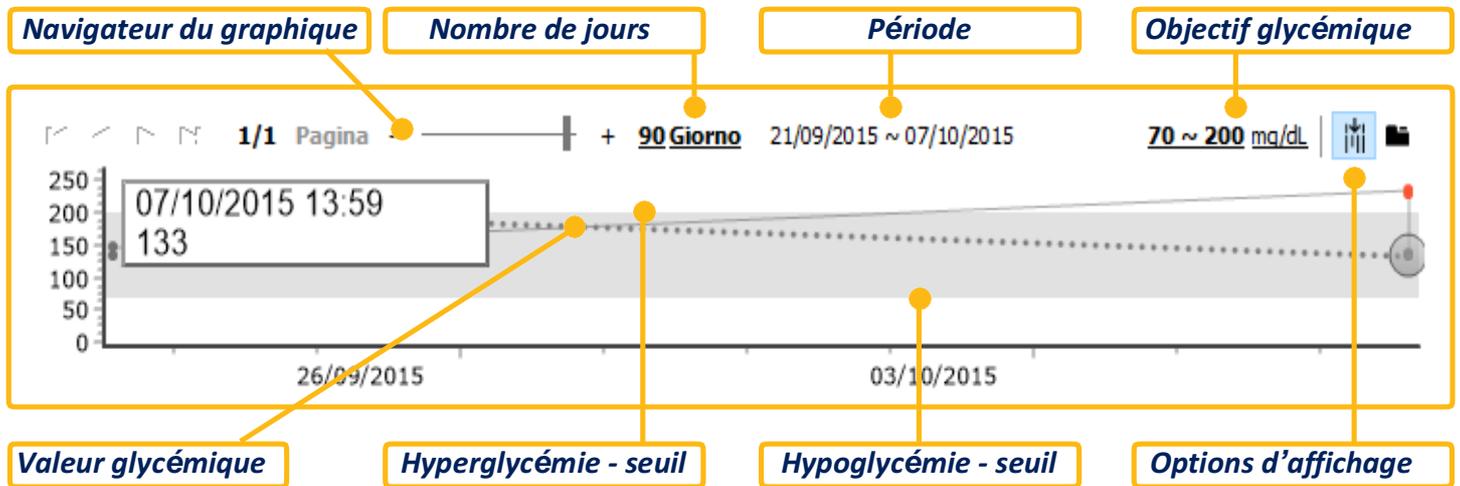


<Figure 39> Graphique

### 3.1 – Modifier l'intervalle de l'objectif glycémique

Vous pouvez modifier l'intervalle de l'objectif glycémique.

#### 3.1.1 – Préférences

Pour les patients non enregistrés, cliquez sur « Préférences ». Paramétrez ensuite l'intervalle de l'objectif glycémique.

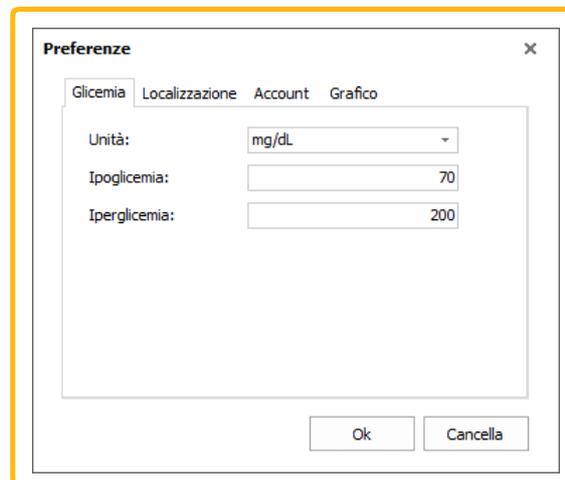

The 'Preferenze' dialog box has the following fields:

- Glicemia:** Selected tab.
- Localizzazione:** Tab.
- Account:** Tab.
- Grafico:** Tab.
- Unità:** A dropdown menu set to 'mg/dL'.
- Ipoglicemia:** A text input field containing the value '70'.
- Iperglicemia:** A text input field containing the value '200'.
- Buttons:** 'Ok' and 'Cancella' buttons at the bottom.

<Figure 40> — Modifier l'intervalle de l'objectif glycémique pour les patients non enregistrés

### 3.1.2 – Informations patient

Pour les patients enregistrés, cliquez sur « seuil » (valeur limite). Paramétrez ensuite l'intervalle de l'objectif glycémique dans la boîte de dialogue Informations patient



**Informazioni utente** [X]

**Nome**  
John

**Cognome**  
doe

**e-mail**  
[ ]

**telefono**  
[ ]

**Genere**  
Donna

**Data di nascita**  
1 gennaio 2007

**Altezza** 180.0 cm      **Peso** 70.0 kg

**Tipo diabete**  
Insulino dipendente

**Diabetico dal**  
2 febbraio 2015

**Target glicemia**  
70 - 200 mg/dL

**Lista dispositivo**

Prodotto	Numero di serie
SD GlucoNavii NFC	M07C01AA0017

Ok      Cancella

<Figure 41> — Modifier l'intervalle de l'objectif glycémique pour les patients enregistrés

### 3.2 – Modifier la période de temps du graphique


Faites glisser le curseur sur le navigateur du graphique ou cliquez sur le nombre de jours.



Navigation icons      2/2 Pagina      + 7 Giorno      12/09/2014 ~ 12/09/2014      70 ~ 200 mg/dL

<Figure 42> Navigateur graphique

Vous verrez apparaître la fenêtre Période sélectionnée. Vous pourrez ainsi sélectionner la période souhaitée (7, 14, 30, 90 jours) ou saisir un nombre de jours personnalisé.

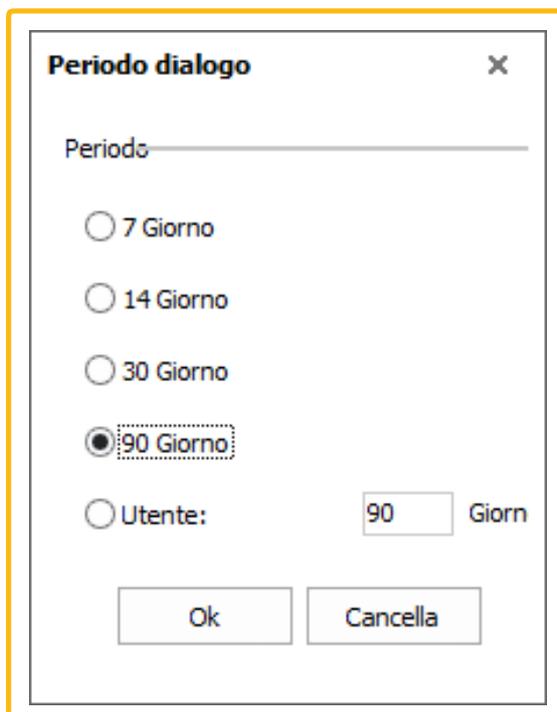


<Figure 43> Fenêtre Période sélectionnée

### 3.3 – Modifier les modalités d’affichage du graphique


Les modalités d’affichage suivantes peuvent être modifiées.

- Vue combinée : afficher le graphique et le tableau d’analyses ensemble.
- Vue séparée : afficher le graphique et le tableau d’analyses séparément.

Vous pouvez modifier les modalités d’affichage en cliquant sur .

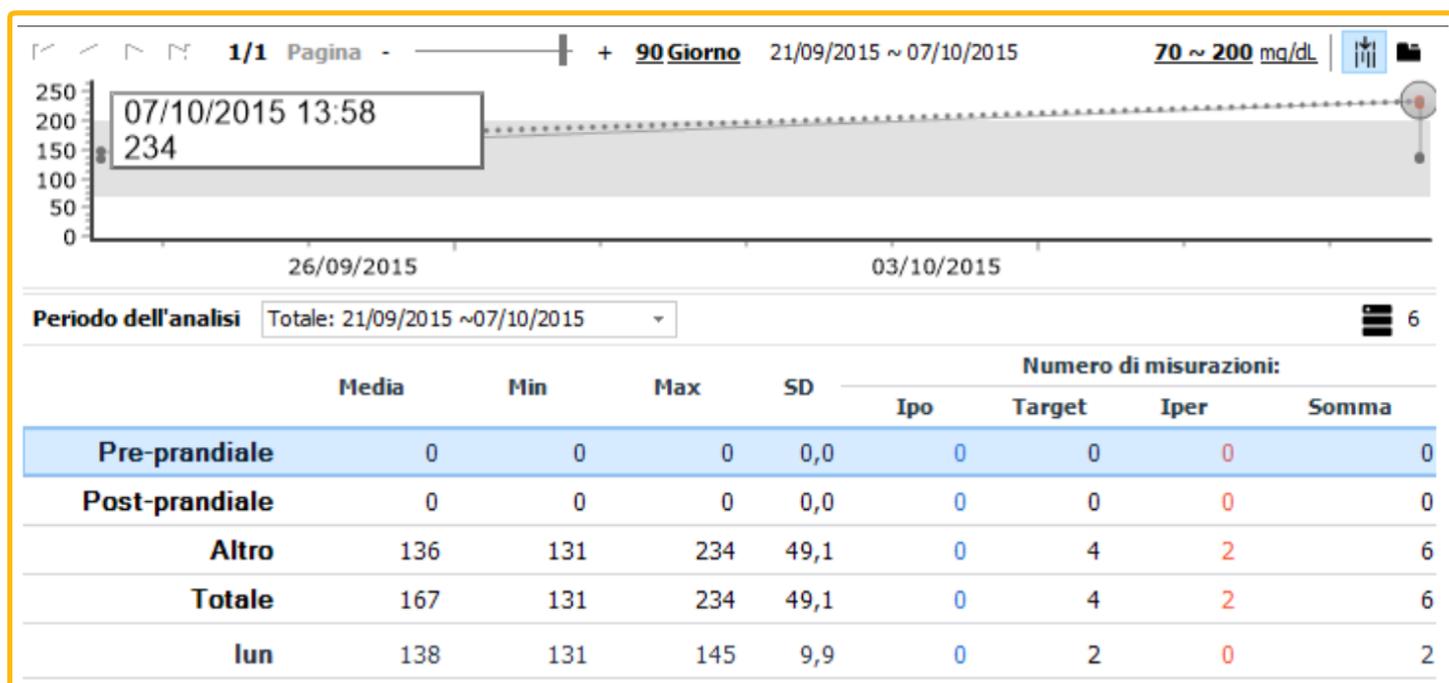

<Figure 42> Navigateur graphique

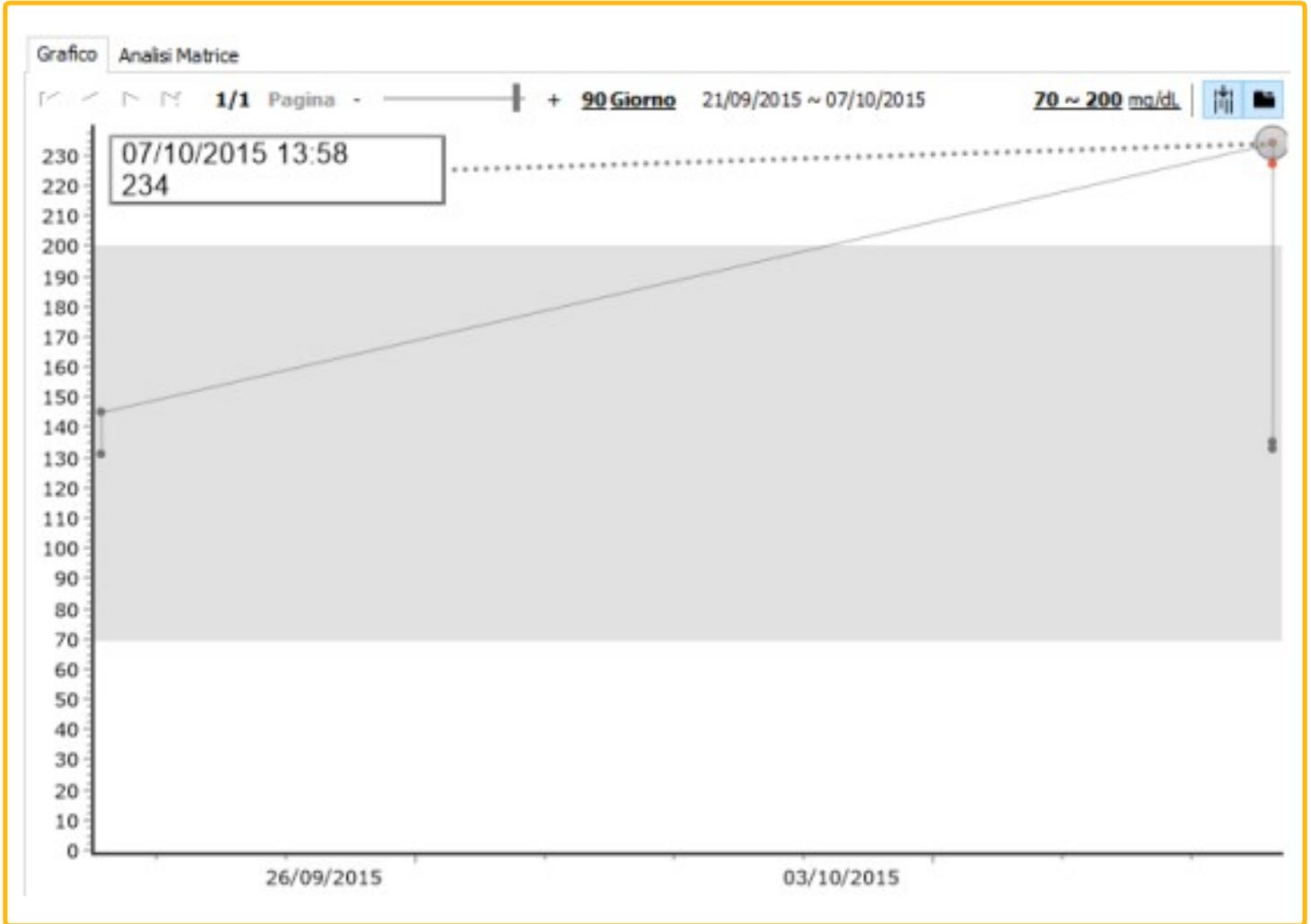

**Grafico** | Analisi Matrice



Periodo dell'analisi Totale: 21/09/2015 ~ 07/10/2015 6

	Media	Min	Max	SD	Numero di misurazioni:			Somma
					Ipo	Target	Iper	
<b>Pre-prandiale</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	
<b>Post-prandiale</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	
<b>Altro</b>	136	131	234	49,1	0	4	2	
<b>Totale</b>	167	131	234	49,1	0	4	2	
<b>lun</b>	138	131	145	9,9	0	2	0	
<b>mar</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	
<b>mer</b>	182	133	234	55,8	0	2	2	
<b>gio</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	
<b>ven</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	
<b>sab</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	
<b>dom</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	

<Figure 45> Affichage par onglet

### 3.4 – Appliquer l'intervalle automatique à l'axe Y

Cliquez sur l'icône  et activez la fonction d'intervalle automatique pour l'axe Y. L'intervalle glycémique de l'axe Y est automatiquement modifié lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur le graphique.

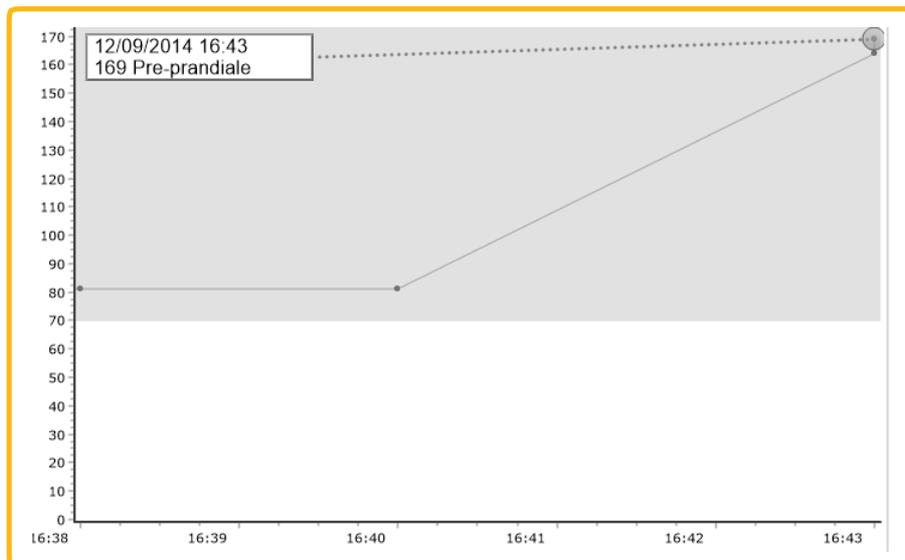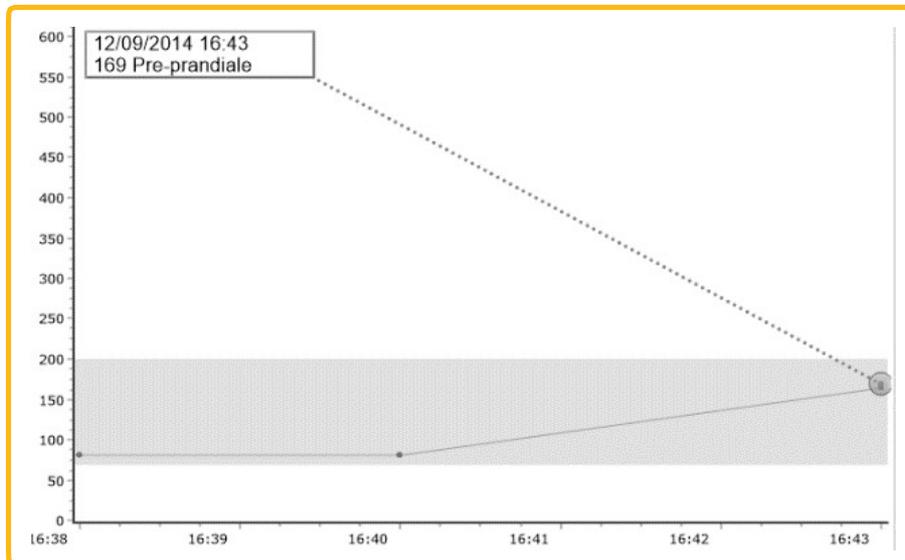

<Figure 46> Intervalle glycémique de l'axe Y, avant et après

## 4 – Analyses

Le logiciel analyse les données glycémiques pour la période sélectionnée.

Il affiche les informations statistiques concernant les données glycémiques disponibles, par jour de la semaine, avant le repas/après le repas/autre<sup>2</sup>.

- Valeur moyenne
- Minimum
- Maximum
- Écart-type
- Nombre de mesures

<sup>2</sup> Autre correspond aux données glycémiques qui ne sont pas définies comme événement d'avant-repas ou d'après-repas.

	Media	Min	Max	SD	Numero di misurazioni:			
					Ipo	Target	Iper	Somma
<b>Pre-prandiale</b>	294	18	641	190,3	5	10	26	4
<b>Post-prandiale</b>	321	28	628	175,3	1	9	27	3
<b>Altro</b>	134	63	644	175,6	1	4	21	2
<b>Totale</b>	329	18	644	184,0	7	23	74	10
<b>lun</b>	321	18	627	221,9	3	2	11	1
<b>mar</b>	261	28	572	141,4	2	3	11	1
<b>mer</b>	349	24	633	198,4	1	5	10	1
<b>gio</b>	440	282	530	112,5	0	0	4	
<b>ven</b>	248	54	644	172,1	1	9	10	2
<b>sab</b>	419	99	610	153,6	0	1	15	1
<b>dom</b>	366	82	641	181,1	0	3	13	1


<Figure 47> Analyses

## NOTE

- Ne pas inclure les résultats des tests de la solution de contrôle dans les données à analyser.
- Par exemple, si le nombre total de données transférées d'un glucomètre est de 100, 95 données concernent les résultats des tests glycémiques et 5 données correspondent aux tests de la solution de contrôle.
- Le logiciel analysera donc uniquement les 95 données correspondant aux résultats des tests de glycémie.


### 4.1 – Modifier la période de temps du graphique

Cliquez sur l'icône du menu déroulant. La fenêtre Période d'analyse apparaît.

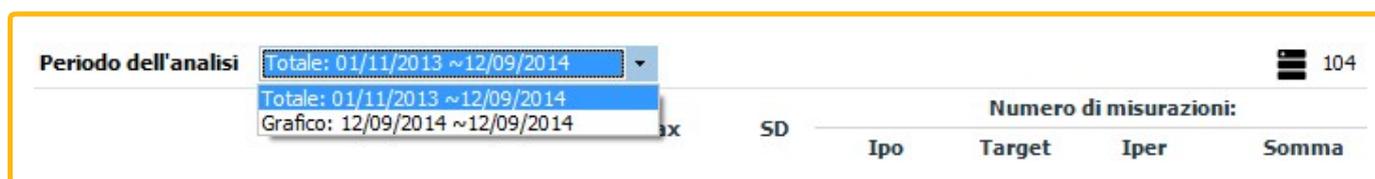

<Figure 48> Modifier la période d'analyse

Vous pouvez sélectionner la période souhaitée (7, 14, 30, 90 jours) ou saisir un nombre de jours personnalisé.

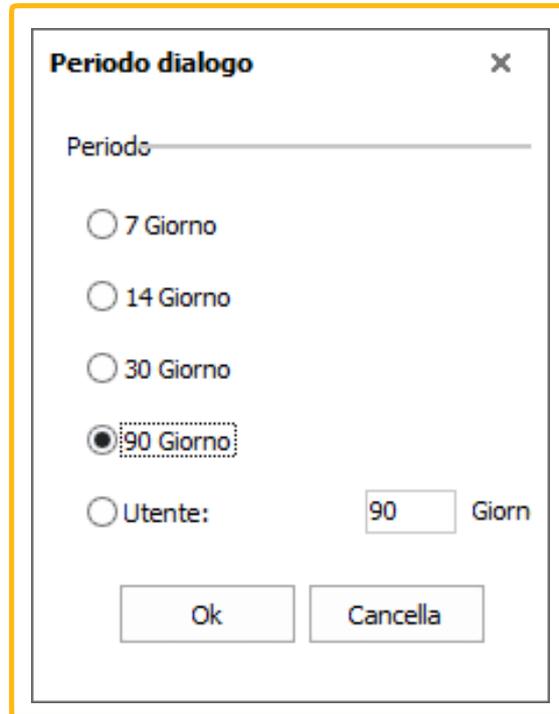


<Figure 49> Boîte de dialogue Période d'analyse


## 5 – Rapport

### 5.1 – Imprimer les résultats

Cliquez sur l'icône « Impression ». Vous verrez apparaître la boîte de dialogue d'impression et l'aperçu du rapport.

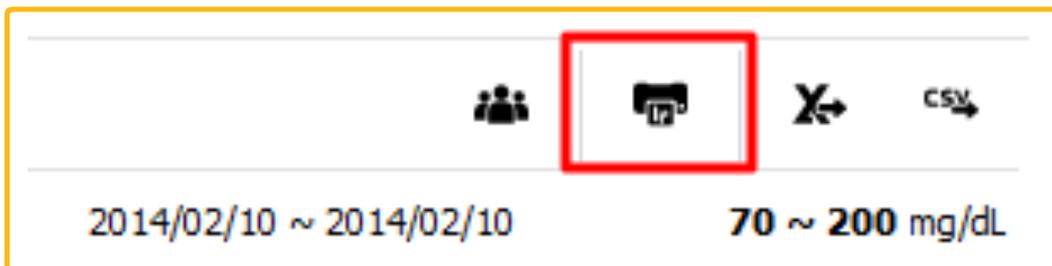

<Figure 50> Icône Impression

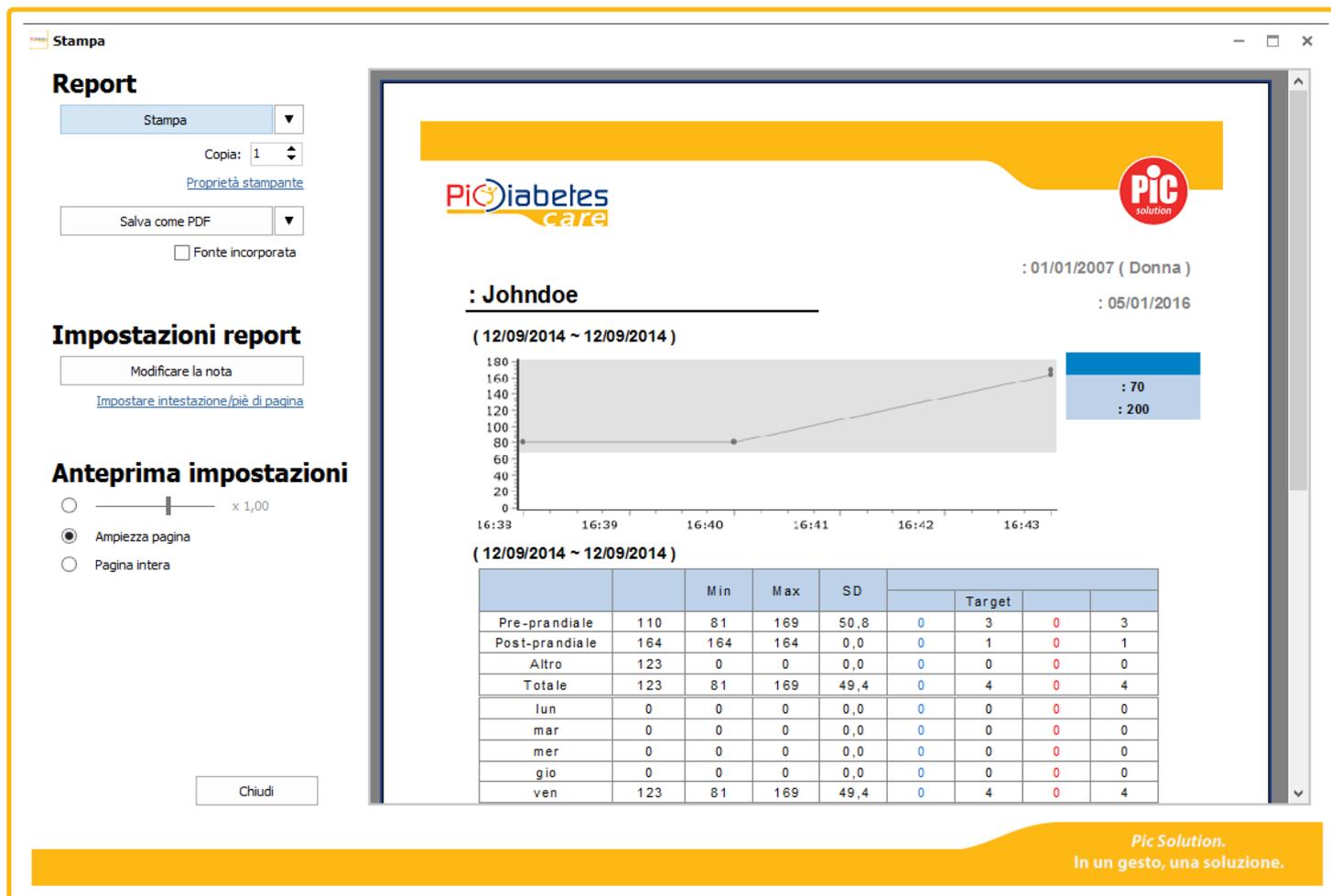


<Figure 51> Boîte de dialogue Impression

### 5.1.1 – Imprimer

Cliquez sur l'icône « Impression » pour envoyer le rapport à l'imprimante reliée à votre PC.

### 5.1.2 – Choisir une autre imprimante

Cliquez sur l'icône du menu déroulant, à côté de « Imprimer ». Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

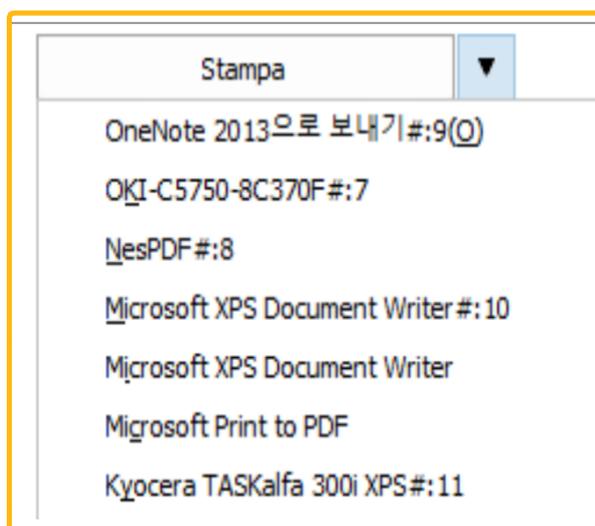

<Figure 52> Sélectionner l'imprimante

## 5.1.3 – Modifier les propriétés de l'imprimante

Cliquez sur « Propriétés de l'imprimante » pour modifier les propriétés de l'imprimante.

**Stampa**

**Report**

Stampa

Copia: 1

Proprietà stampante

Salva come PDF

Fonte incorporata

**Impostazioni report**

Modificare la nota

Impostare intestazione/piè di pagina

**Anteprima impostazioni**

x 1,00

Ampiezza pagina

Pagina intera

Chiudi

**Report Preview:**

**Johndoe**

01/01/2007 (Donna)

05/01/2016

(12/09/2014 ~ 12/09/2014)

	Min	Max	SD	Target			
Pre-prandiale	110	81	169	50,8	0	3	0 3
Post-prandiale	164	164	164	0,0	0	1	0 1
Altro	123	0	0	0,0	0	0	0 0
<b>Totale</b>	<b>123</b>	<b>81</b>	<b>169</b>	<b>49,4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0 4</b>
lun	0	0	0	0,0	0	0	0 0
mar	0	0	0	0,0	0	0	0 0
mer	0	0	0	0,0	0	0	0 0
gio	0	0	0	0,0	0	0	0 0
ven	123	81	169	49,4	0	4	0 4

Pic Solution.  
In un gesto, una soluzione.

<Figure 53> Boîte de dialogue Impression

Les propriétés de l'imprimante s'affichent. Toutes les propriétés de l'imprimante peuvent être paramétrées.

Followie on PRINTRSV5 Properties

Setup Paper Print Quality Valid Access Watermarks

Job Type: Normal Print Copies: 1

Orientation: Portrait  Rotate by 180 degrees

Layout: 1 Page per Sheet  Draw Frame Border

Page Order: Right, then Down

Duplex: Open to Left  Non-Reduction Booklet

Staple: Off Punch: Off


Save... Load... About... Restore Defaults

OK Cancel Help


<Figure 54> Propriétés de l'imprimante

## 5.2 – Sauver les données dans un fichier/Envoyer par mail

Cliquez sur l'icône du menu déroulant ▼ pour enregistrer le rapport ou pour l'envoyer par mail avec Outlook.

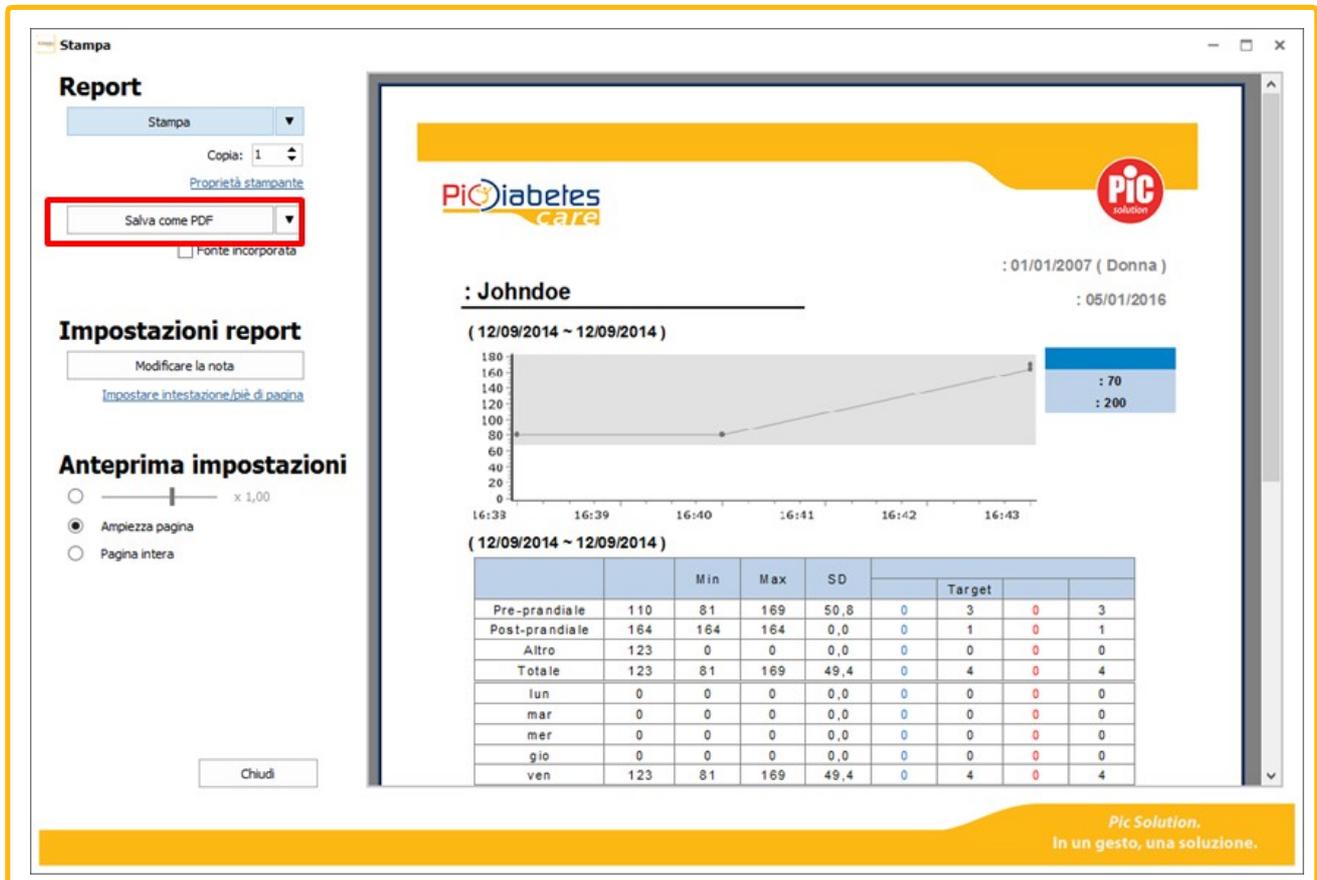

<Figure 55> — Boîte de dialogue Imprimer — Sauver les données dans un fichier/Envoyer par mail

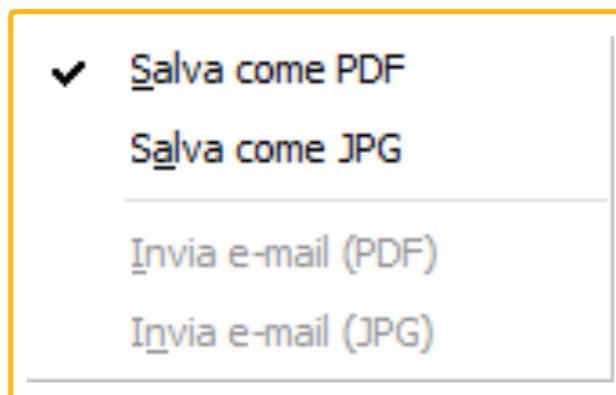


<Figure 56> Menu déroulant Enregistrer sous/Envoyer par mail

### NOTE

- Pour pouvoir utiliser la fonction « Envoyer par mail », le logiciel Microsoft Outlook doit être installé sur votre ordinateur et vous devez disposer d'un compte de courrier électronique.

## 5.3 – Ajouter/modifier une note

**Vous pouvez ajouter ou modifier une note dans le rapport.** La rubrique « notes » du rapport correspond au cadre noir.

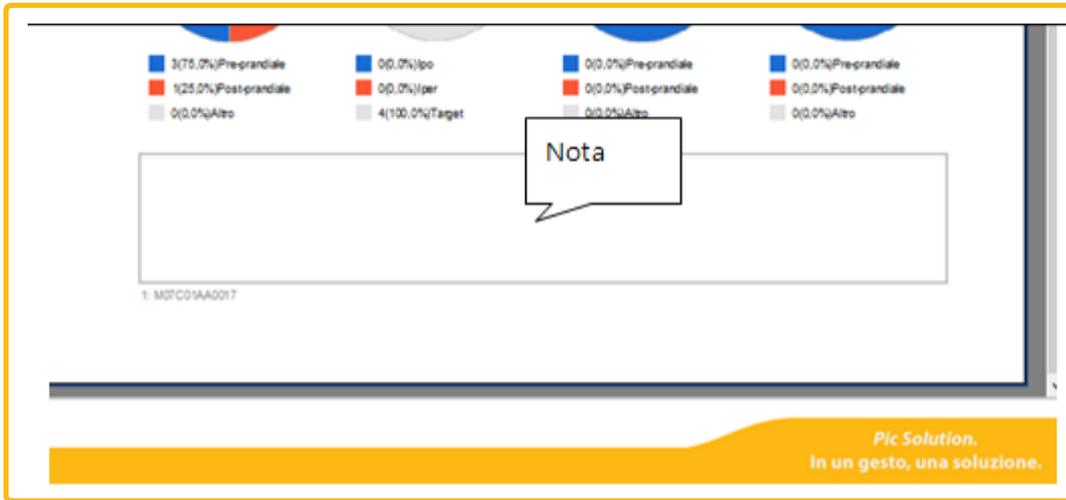


<Figure 57> Section « notes » de l'aperçu du rapport

Cliquez sur




Modifier la note ou directement dans le cadre. La fenêtre Notes apparaît.

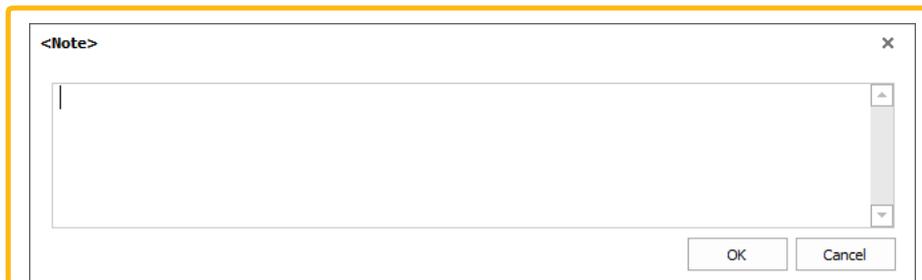

<Figure 58> Ajouter/modifier une note

## 5.4 – Ajouter/modifier l'en-tête/le pied de page


Cliquez sur l'icône « En-tête/pied de page ».

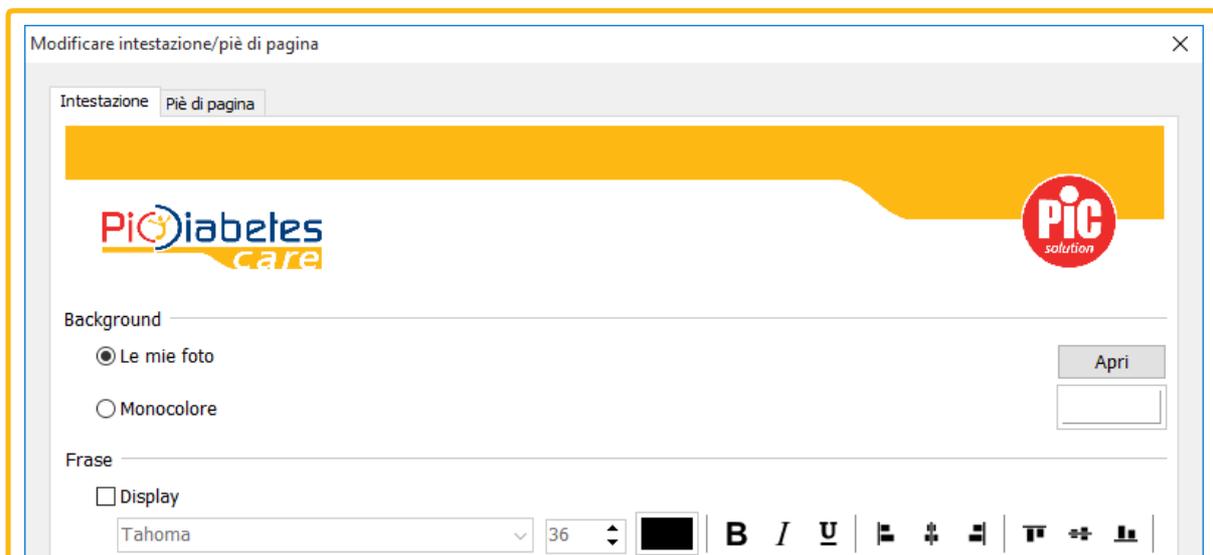

<Figure 59> Boîte de dialogue ajout/modification en-tête/pied de page

## 5.4.1 – Ajouter/modifier l'image de fond


En image de fond, vous pouvez choisir une photographie (BMP, JPG ou PNG) ou une teinte monochrome.

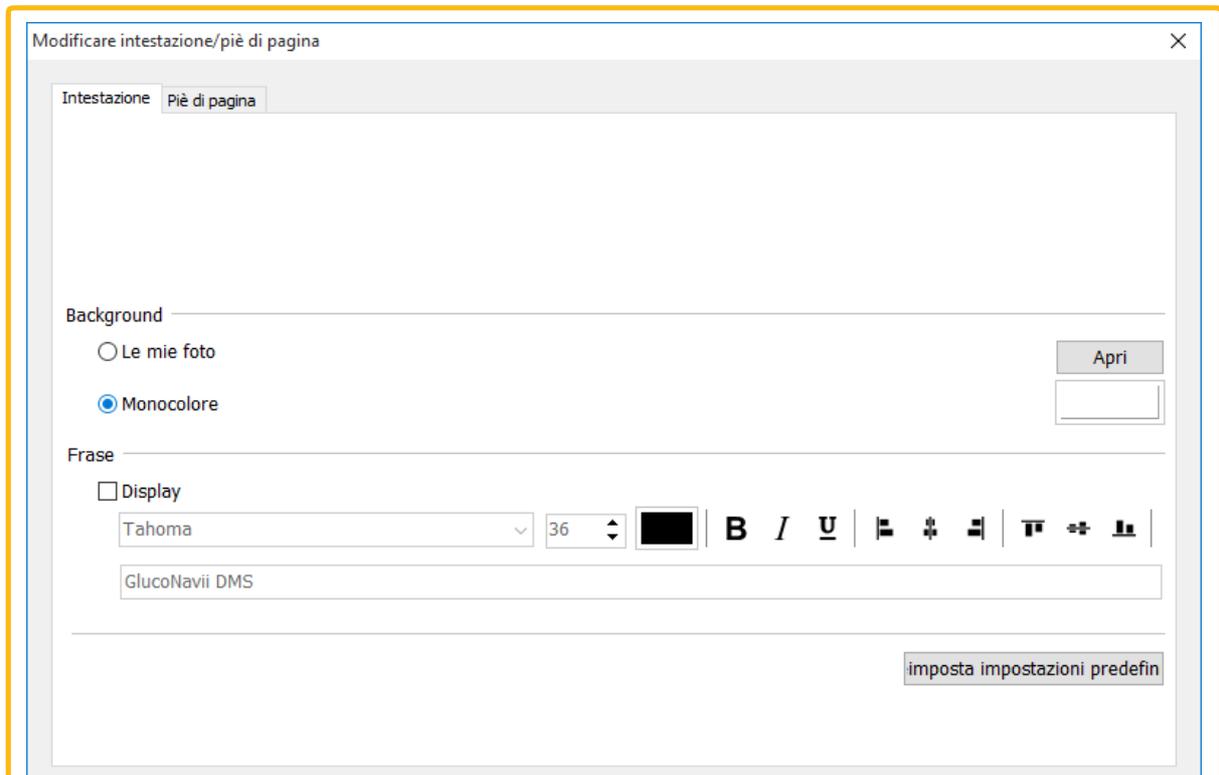

<Figure 60> Sélection de l'option monochrome

## 5.4.2 – Ajouter/modifier du texte

Cochez la case « Display ». Sélectionnez le style, la taille, la couleur de la police et les autres options:

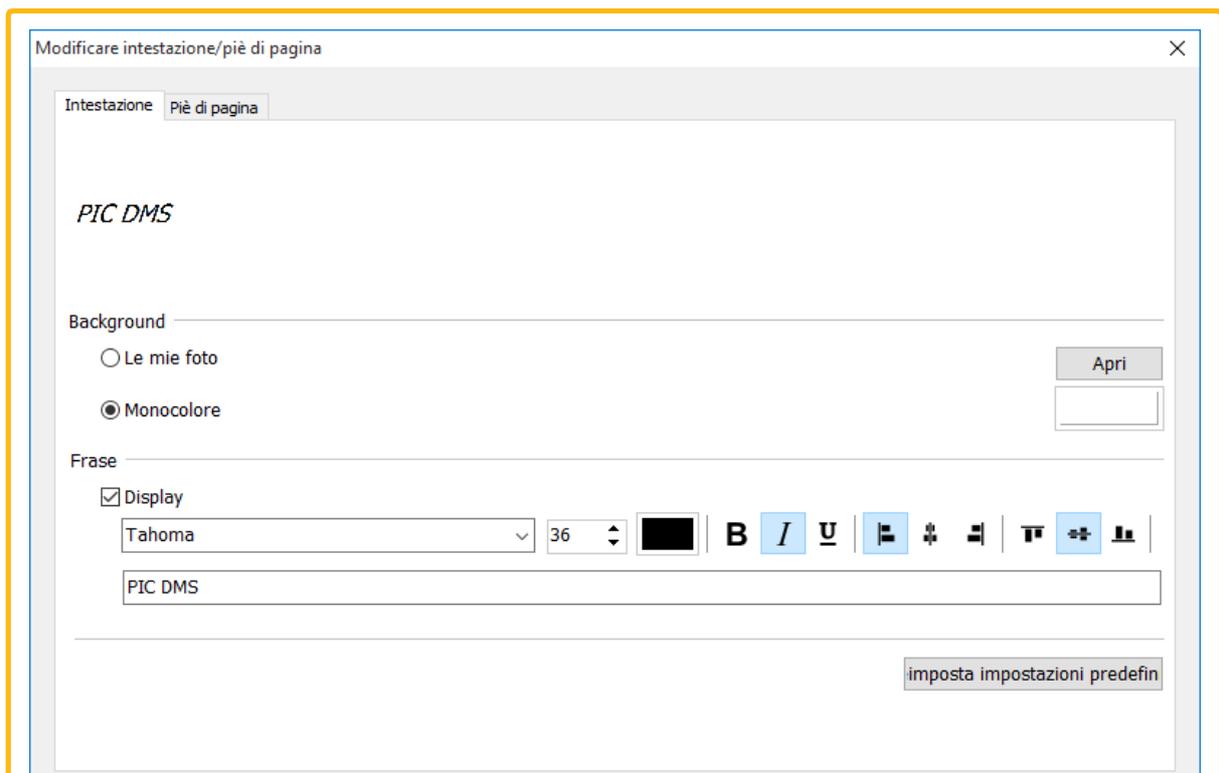

<Figure 61> Exemple de texte

### 5.4.3 – Restaurer les réglages par défaut d'en-tête/pied de page


Cliquez sur  pour rétablir les réglages par défaut d'en-tête / pied de page.

## 6 – Exporter les données

Vous pouvez exporter les données dans un fichier au format Excel ou CSV.

### 6.1 – Exportation dans un fichier au format Excel / CSV

Cliquez sur l'icône  Export ou  CSV. La boîte de dialogue Exporter les résultats glycémiques s'affiche.

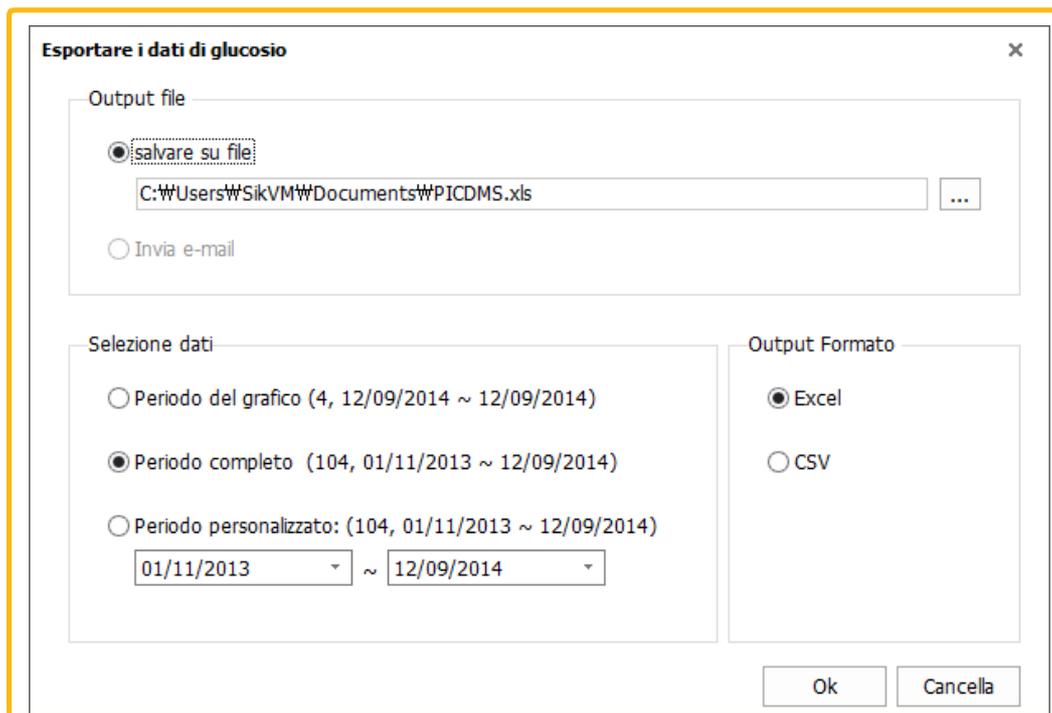

<Figure 62> Exporter les résultats glycémiques

Vous pouvez sélectionner le format, la position et la période des résultats glycémiques à exporter. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les résultats glycémiques.



< Figura 63> Opération terminée

## CHAPITRE 5 : RÉOLUTION DES PROBLÈMES

### 1 – Recherche des problèmes et solutions

DESCRIPTION DE LA SITUATION	SOLUTION									
Erreur dans l'installation du programme	Assurez-vous que votre PC est équipé d'un système d'exploitation compatible. Versions compatibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft® Windows Vista</li> <li>• Microsoft® Windows 7</li> <li>• Microsoft® Windows 8</li> <li>• Microsoft® Windows 10</li> </ul>									
	Assurez-vous que votre PC possède les caractéristiques minimales requises :									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPU</th> <th>RAM</th> <th>Disque dur</th> <th>Écran</th> <th>Autre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800 MHz</td> <td>512 MB</td> <td>50 MB</td> <td>1024 × 768</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Port USB</li> <li>• Câble de raccordement Pic</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	CPU	RAM	Disque dur	Écran	Autre	800 MHz	512 MB	50 MB	1024 × 768
CPU	RAM	Disque dur	Écran	Autre						
800 MHz	512 MB	50 MB	1024 × 768	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port USB</li> <li>• Câble de raccordement Pic</li> </ul>						
Erreur d'installation et/ou de fonctionnement du programme	<p>Les fonctions de sécurité de votre ordinateur doivent être activées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant d'installer et d'utiliser le logiciel, lancez l'analyse de votre ordinateur à l'aide d'un programme antivirus et anti-logiciel espion de source fiable afin de vous assurer que votre système est exempt de tout virus.</li> <li>• Installez, configurez et activez un logiciel antivirus adapté.</li> <li>• Veillez à disposer d'un logiciel antivirus à jour.</li> <li>• Assurez-vous que votre système d'exploitation soit équipé des fonctions de sécurité les plus récentes possible.</li> <li>• Activez le pare-feu sur votre PC.</li> <li>• Windows Vista, 7, 8 et 10 incluent un pare-feu qui s'active par défaut.</li> </ul>									
L'icône de synchronisation ne s'affiche pas sur l'interface utilisateur.	Vérifiez que le câble USB est correctement relié au PC. Si le problème persiste, veuillez contacter le service commercial au 01.55.93.26.48.									
Le logiciel ne répond pas lorsque vous allumez le glucomètre pour démarrer le transfert de données.	Vérifiez que le câble Pic est correctement relié au PC. Appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage du glucomètre. Si le problème persiste, veuillez contacter le service commercial au 01.55.93.26.48.									

### 2 – Message d'erreur sur le glucomètre

Dans certaines circonstances, le message d'erreur « E-5 » peut apparaître sur l'écran du glucomètre. Essayez d'appliquer la solution suivante.

INDICATION	DESCRIPTION DE L'ERREUR
	<p><b>Erreur : Erreur de communication</b></p> <p>La communication entre le glucomètre et le PC s'est interrompue pendant la synchronisation.</p>
	<p><b>Solution</b></p> <p>Rallumez le glucomètre.</p> <p>Si le message d'erreur continue de s'afficher, veuillez contacter le service commercial au 01.55.93.26.48.</p>



**Fabricant**

**SD Biosensor, Inc.**

**Head office:** C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

**Manufacturing site:** 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbukdo, 28161, REPUBLIC OF KOREA

**Représentant européen**



**MT Promedt Consulting GmbH**

Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany  
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021



**Distribué par:**

**PIKDARE S.p.A.**

Via Saldarini Catelli, 10

22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia



C'est facile avec Pic!